




AMANNGIRRBACH


Ceramill Software Upgrade 4.11

Highlights

- Erweiterte Frässtrategien für diverse Materialien verfügbar
- Optimierungen für die Bearbeitung von Abutment Blanks
- Neue Frässtrategien für die Bearbeitung von Premilled Abutment Blanks aus Titan Grade 4 und CoCr für die Ceramill Matron
- Erweiterung Ceramill M-Part Software um die Indikation Split Denture
- Funktionserweiterungen im Ceramill Software Manager – Exocad Denture Bibliotheken für Totalprothesen automatisch installieren
- Neues Add-on-Modul *Inspira® Denture Tooth Library for AG* verfügbar

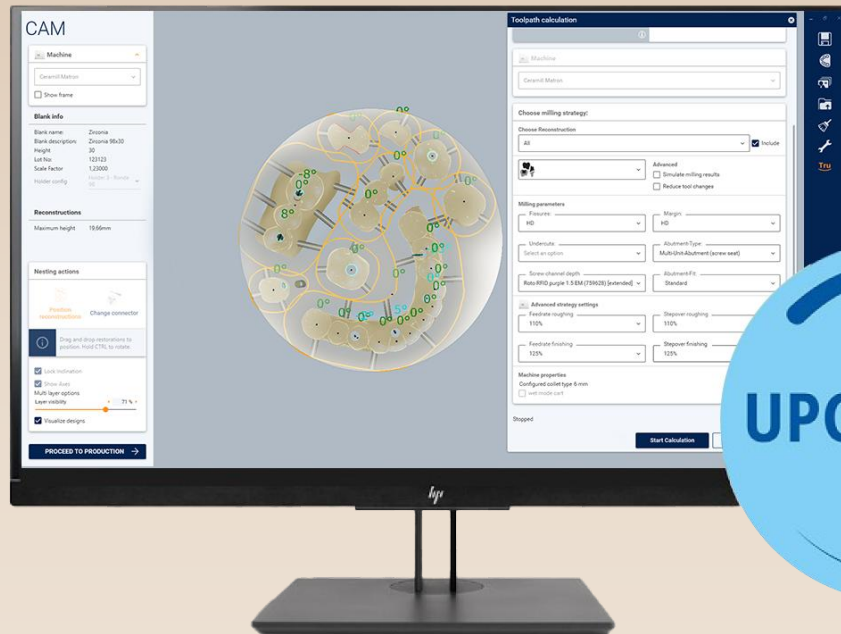

ERWEITERTE STRATEGIEEINSTELLUNGEN VERFÜGBAR FÜR VERSCHIEDENSTE MATERIALIEN


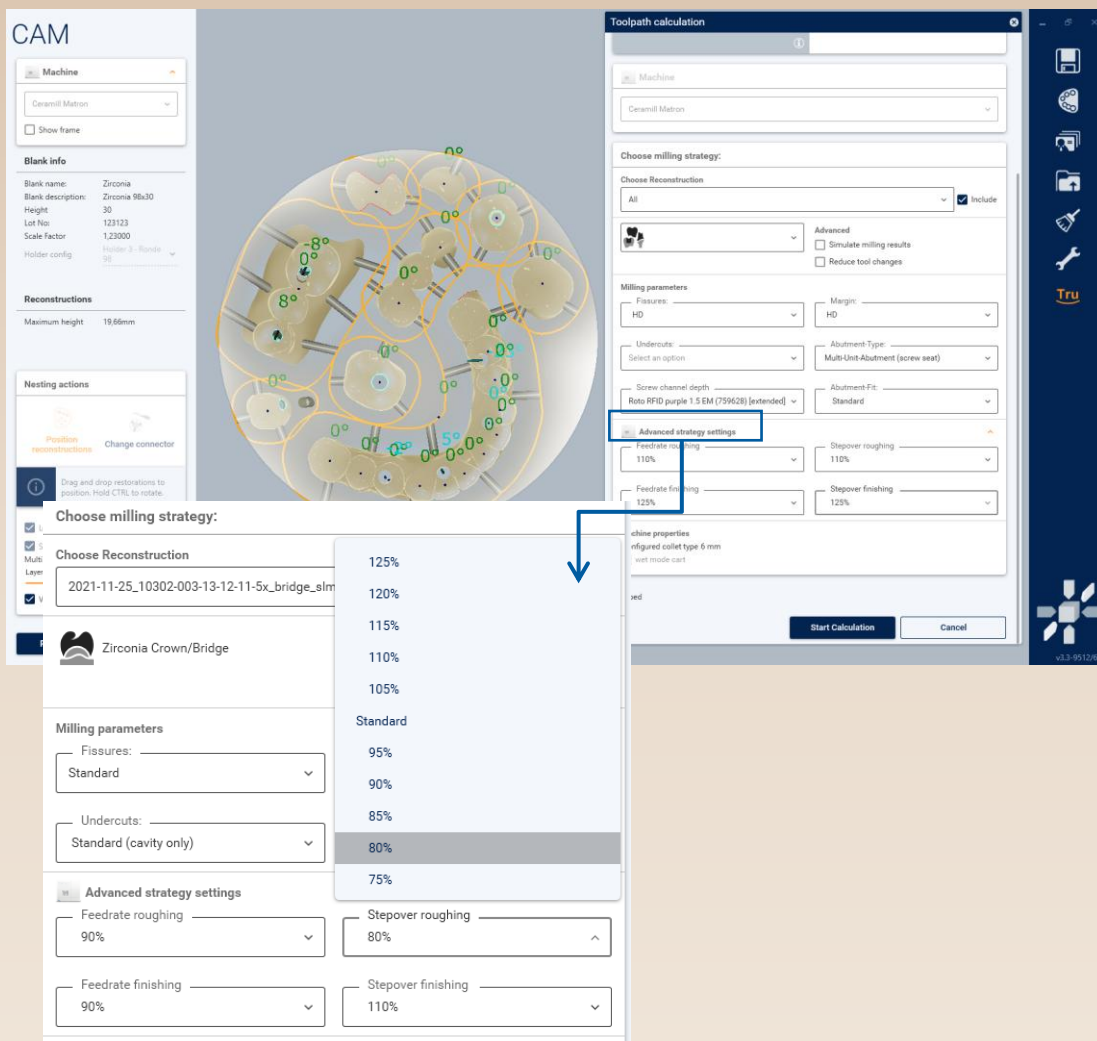


Durch erweiterte Strategieeinstellungen erhält der Anwender deutlich mehr Einfluss auf den Fertigungsprozess. Vorschubgeschwindigkeit und seitliche Zustellung der Werkzeuge können gezielt angepasst werden.

- ✓ Mehr Freiheit und Individualität im Fertigungsprozess
- ✓ Fräszeiten und Oberflächenqualität individuell anpassen & optimieren
- ✓ Effizienz und Präzision je nach Anforderung


OPTIMIERUNGEN FÜR DIE BEARBEITUNG VON ABUTMENT BLANKS

Konturnahe Bearbeitung der Haltestege

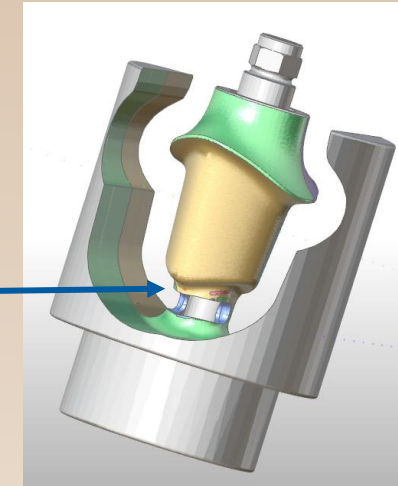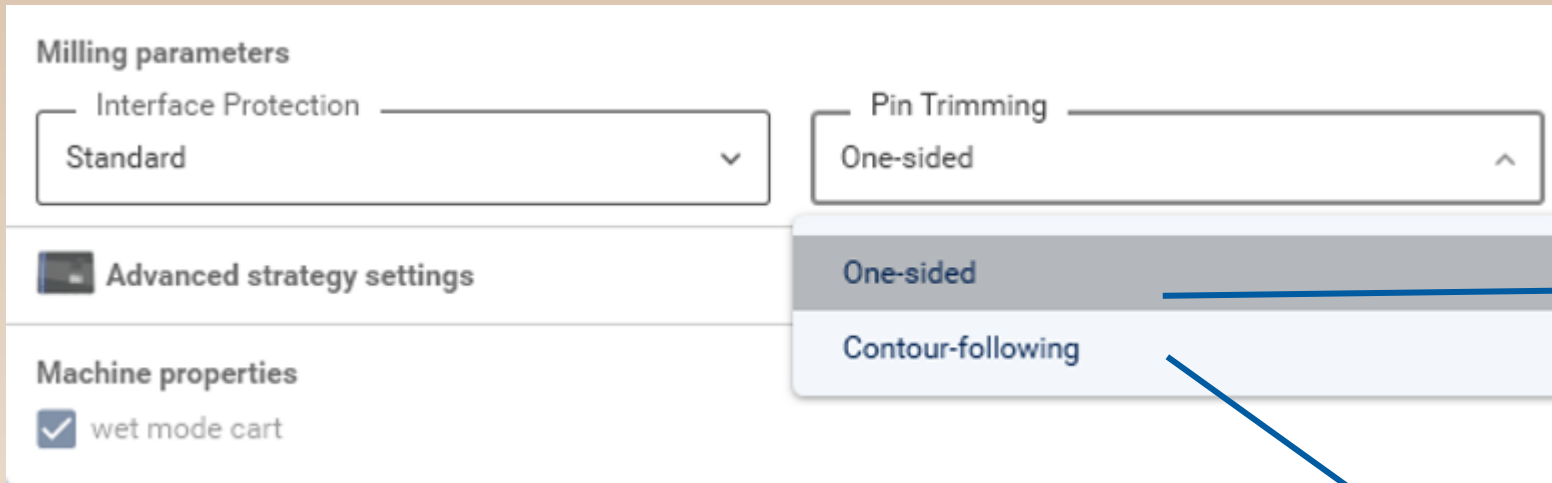

Optimierte Bearbeitungsstrategie für Haltestege verfügbar

- ✓ Geringerer Nachbearbeitungsaufwand dank maschinenseitiger Konturbearbeitung.
- Die neue Strategie wird bei Ceramill Motion 2 & 3 immer angewendet
- Individuell auswählbar für die Ceramill Matron und Matik Verwendung 3mm Werkzeuge
- Individuell auswählbar für die Ceramill Matron Verwendung 6mm Werkzeuge – je nach gewähltem Material (Ti Grade 5, Ti Grade 5 & CoCr oder Ti Grade 4)

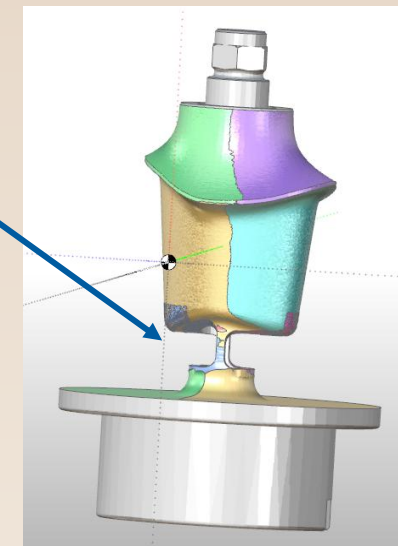

NEUE FRÄSSTRATEGIEN FÜR DIE BEARBEITUNG VON PREMILLED ABUTMENT BLANKS AUS TITAN GRADE 4 UND COCR FÜR DIE CERAMILL MATRON



Ceramill Matron (6mm)

Milling parameters

Interface Protection Standard

Advanced strategy settings

Material processing

Ti Grade 5 - Roto RFID brown 3.0 (759619)

Ti Grade 5 - Roto RFID brown 3.0 (759619)

Ti Grade 5 / CoCr - Roto RFID brown 2.5 (759611)

Ti Grade 4 - Roto RFID brown 2.5 (759611)

Machine properties

Configured collet type 6 mm

☒ wet mode cart

NEU!


Ti Grade 4
CoCr Abutment
Blank Strategie

Neue optimierte Strategien
inkl. der neuen
konturoptimierte Bearbeitung
der Haltestege


ERWEITERUNG CERAMILL M-PART SOFTWARE UM DIE INDIKATION SPLIT DENTURE

Ab sofort können hybride Stegarbeiten – Split Denture Indikationen auch mit der Ceramill M-Part Software designt werden

- ✓ Komplexe Arbeiten einfach gemacht: Implantatgetragene Suprastrukturen in Ceramill Mind designen und mit nur wenigen Klicks mit Hilfe der Ceramill M-Part Software in perfekt ineinandergreifenden Komponenten separieren.
- ✓ Mit maximaler Flexibilität im digitalen Workflow Stege für REAX Bridge- und All-on-X-Designs präzise erstellen individuelle Anpassungen vornehmen.
- ✓ Für das Design der Stegkonstruktion wird zusätzlich zum Modul Ceramill M-Part das Modul Ceramill M-Bars aktiviert sein.

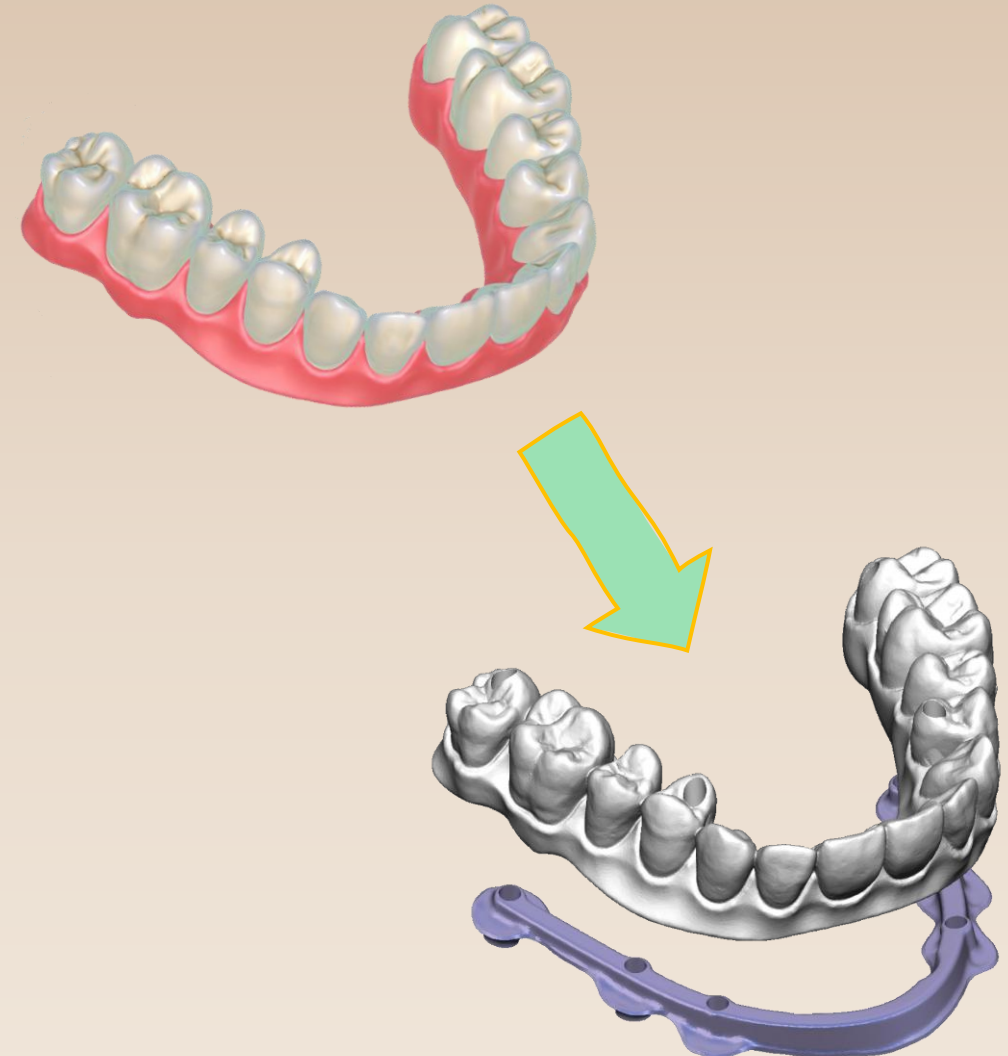

FUNKTIONSERWEITERUNGEN IM CERAMILL SOFTWARE MANAGER – EXOCAD DENTURE BIBLIOTHEKEN FÜR TOTALPROTHESEN AUTOMATISCH INSTALLIEREN

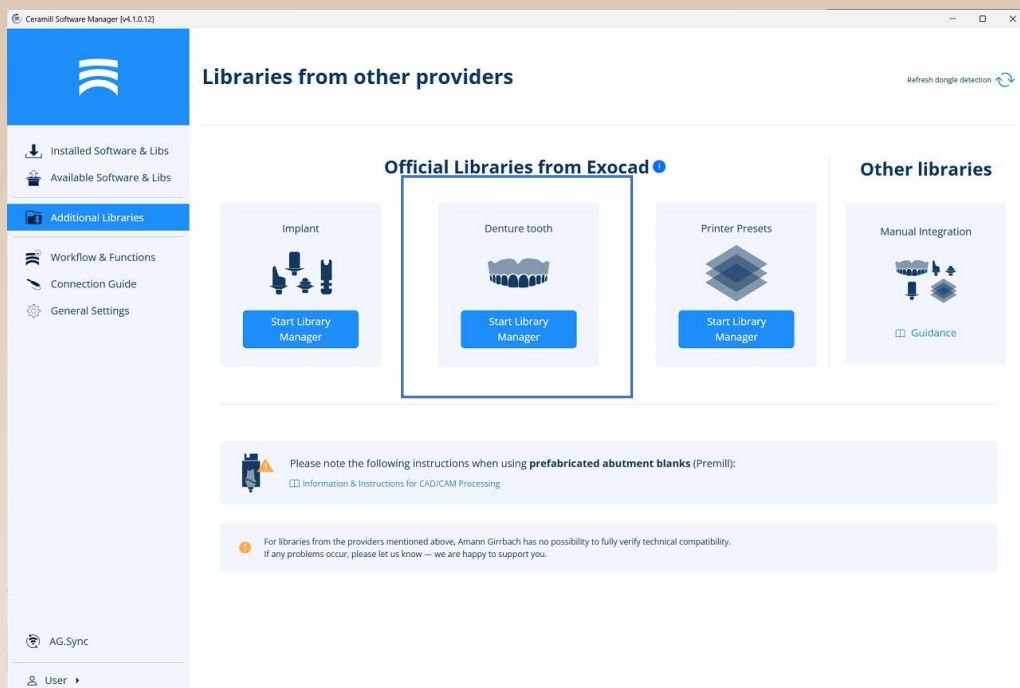


Prothesenzahnbibliotheken weiterer Hersteller

Künftig können auch die über Exocad verfügbaren Zahnbibliotheken verschiedener Hersteller für Total Prothesen automatisch über unseren Ceramill Software Manager in die Ceramill Mind integriert werden

- Eine detaillierte Übersicht inkl. der jeweiligen Produktionsoptionen ist auf der exocad-Webseite verfügbar.

„[Denture / Tooth libraries - exocad](#)“

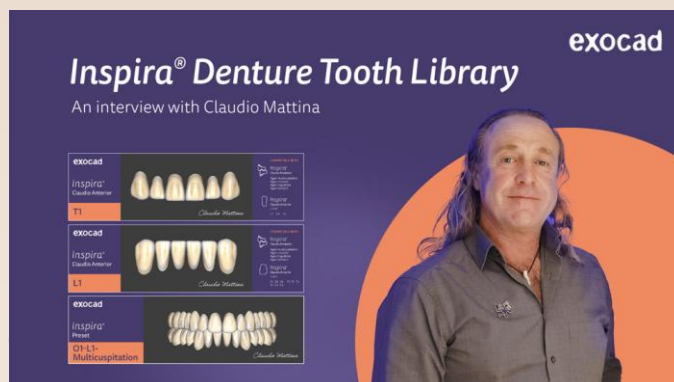

Neues Add-on-Modul Inspira® Denture Tooth Library for AG

PERPETUAL

179707 - Inspira Denture Tooth Library for AG

Flex

996916 - Modulaktivierung Miet-Lizenz Inspira Denture Tooth Library for AG

Nach dem Erwerb des Add-on-Moduls kann die Bibliothek über den CSM automatisch installiert werden

Im Ceramill Mind Master Bundle ist das Modul bereits inkludiert.