

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

Achtung
Warning
Attenzione
Atención

Made in the European Union



AMANNGIRRBACH

33557-FB 201612-05

NÁVOD K OBSLUZE

CERAMILL PONTIC

Překlad originálního návodu k použití

POPIS VÝROBKU

U modelovacích materiálů Ceramill se jedná o světlem vytvrditelné modelovací umělé hmoty, v konzistencích slabě tekoucích a tvarovatelných.


Ceramill Pontic (760522) má tvarovatelnou konzistenci a používá se pro modelaci mezičlenů můstku. Pro izolování sádry resp. matného laku před modelovací umělou hmotou slouží na modelovací umělé hmotě odsouhlasená izolace Ceramill Sep (760561).

MANIPULACE

Polymerační vlnová délka	400 - 500 nm
Doba polymerace	7 sec
Hloubka polymerace	≤ 1mm

Údaje platí pro Ceramill Pontic, s ohledem na zpracování a teplotu v místnosti.

Světlem vytvrditelné umělé hmoty se během polymerace zásadně smršťují.

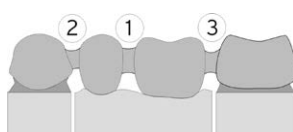

Mezičleny můstku z materiálu Ceramill Pontic nejdřív spojte vzájemně ①. Po úplné polymeraci potom jeden po druhém pomocí materiálu Ceramill Gel zafixujte na koncových pilířích ② a ③.

Těleso z umělé hmoty lze u náročných prací nebo pokud design tělesa není jednoznačný dočasně vložit kvůli kontrole lícování do ústní dutiny pacienta. Tato zkouška, tzn. doba setrvání v ústní dutině pacienta, se principiálně neprovádí u každé práce a trvá jen několik minut.

SKLADOVÁNÍ

Upozornění ke skladování: Neskladujte při teplotách nad 25 °C. Uchovávejte v originálním těsně uzavřeném obalu. Chraňte před dopadem světla. **Stálost při uskladnění: 4 roky.**

VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Pacient a uživatel: Modelovací materiály Ceramill mohou vyvolat alergické reakce. Uživatel: Častý a trvalý kontakt pokožky s nezpolymerovaným materiálem může vést k podráždění pokožky.

VZÁJEMNÁ PŮSOBNÍ

Žádná vzájemná působení nejsou známa.

KONTRAINDIKACE

Pacient a uživatel: Modelovací materiály Ceramill by se neměly používat při známé alergii na některou z obsažených látek.

VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dbejte listu s bezpečnostními údaji. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Likvidace obsahu/nádoby podle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů.

DODATEK ZÁRUKY / VYLOUČENÍ ZÁRUKY

Aplikačně technická doporučení, jedno zda jsou sdělena ústně, písemně nebo v průběhu praktické instruktáže, platí jako směrnice. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu dalšímu vývoji. Vyhraujeme si proto změny v obsluze a konstrukci.

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Pontic
Pevnost v ohybu	40 MPa
Modul pružnosti	1000 MPa
Tažnost při přetržení	12 %
Barva	modrá

Chemické složení:

Ceramill Pontic: světlem vytvrditelné, dentální modelovací umělé hmoty na bázi metakrylátu.

BALENÍ / PŘÍSLUŠENSTVÍ

760522	Ceramill Pontic – bal. à 2 ks
760561	Ceramill Sep – izolace sádry resp. matného laku před modelovací umělou hmotou

Listy s bezpečnostními údaji jsou k dispozici na dotaz a na www.amanngirrbach.com

LOT Kód šarže

REF Číslo výrobku

🏭 Výrobce

📖 Dbejte návodu k použití

🕒 Použitelné do

🌡️ Omezení teploty

⚠️ Pozor

🌿 Ohrožení životního prostředí