

ceramill[®] a-temp

DA Brugsanvisning



AMANNGIRRBACH

- Oversættelse af den originale brugsvejledning -

Indholdsfortegnelse

Symbolforklaring	4
Generelle sikkerhedsforskrifter	6
Egnet personale	6
Egenskaber	7
Reklamationsret, garanti/ansvarsfrihed	9
Kontrol af råemnerne	9
Montering i arbejdsbordet	9
Anvendelse	10
Fastgørelse	12
Miljøbeskyttelse	12
Tilbehør	12
Downloadinformationer	12

DA



Symbolforklaring

Advarsler



Advarsler i teksten er kendetegnet med og indrammet af en advarselstrekant.



Hvis der er fare på grund af strøm, erstattes udråbstegnet i advarselstrekanten af et lysesymbol.

Signalord i starten af en advarsel kendetegner typen og alvorligheden af følgerne, hvis forholdsreglerne til afværgelse af faren ikke overholdes.

- _ **BEMÆRK** betyder, at tingskader kan opstå.
- _ **FORSIGTIG** betyder, at lette til mellemsvære personskader kan opstå.
- _ **ADVARSEL** betyder, at alvorlige personskader kan opstå.
- _ **FARE** betyder, at livsfarlige personskader kan opstå.

Vigtige informationer






Vigtige informationer uden fare for mennesker eller ting er kendetegnet med symbolet, der ses her. De er ligeledes indrammet af linjer.



Yderligere symboler i anvisningen

Symbol	Betydning
▷	Punkt, der ses i forbindelse med beskrivelse af en handling
–	Punkt i en liste
•	Underpunkt i en beskrivelse af en handling eller en liste
[3]	Tal i firkantede parenteser refererer til tal i en grafik

Yderligere symboler på produktet

Symbol	Betydning
REF	Artikelnummer
LOT	Chargekode
	Producent
	Brugsanvisning skal overholdes
	Kan bruges indtil
Rx only	Produktet må iht. amerikansk ret kun sælges af eller på vegne af en tandlæge.
SN	Serienummer

Generelle sikkerhedsforskrifter

DA



FORSIGTIG:

Belastning af sundheden som følge af støv fra PMMA!

Når konstruktioner af Ceramill A-Temp bearbejdes, kan der opstå støv, der kan føre til mekanisk irritation af øjne og luftveje.

- ▷ Sørg altid for, at opsugningen fungerer korrekt på fræsemaskinen og arbejdspladsen til individuel efterbearbejdning.
- ▷ Brug personligt beskyttelsesværn (støvbeskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, ...) under arbejdet.
- ▷ Yderligere sikkerhedsrelevante henvisninger fremgår af sikkerhedsdatabladet.



BEMÆRK:

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Egnet personale



BEMÆRK:

Produktet må kun forarbejdes af uddannede tandteknikere/tandlæger.



Egenskaber

Formål

Ceramill A-Temp er brugsfærdige CAD/CAM-råemner på basis af polymethylmethacrylat, der bruges til at fræse temporære kroner og broer samt til at kontrollere, at de passer på gipsmodel/mund, før den endelige behandling finder sted.

Produktbeskrivelse

Ceramill A-Temp er tandfarvede fræseråemner. Disse erstatter tabt tandsubstans i et permanent gebis i form af provisoriske kroner og broer i for- og sidetandområdet. De kan bruges i maks. tre år.

Sikkerhedsdatablad/overensstemmelseserklæring

Sikkerhedsdatabladet kan downloades på hjemmesiden fra Amann Girrbach under *Services > Downloads > Additional documents*. Produktets overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse til producenten.

Tekniske data

	Enhed	Ceramill A-Temp (DIN EN ISO 10477)
3-punkt-bøjestykke	MPa	> 135
Tæthed	g/cm ³	1,19
Vickers hårdhed	HV0,2	24
Vandoptagelse	µg/mm ³	< 25
Opløselighed	µg/mm ³	< 0,6
Restmonomerindhold	%	< 1

Kemisk sammensætning

- _ Polymethylmethacrylat (PMMA)
- _ Farvepigmenter

Råemnernes holdbarhed

Råemnerne kan bruges i 4 år fra produktionsdato, hvis de opbevares korrekt.

Opbevaring

- _ Må kun opbevares i den originale emballage.
- _ Skal opbevares separat fra fødevarer.
- _ Beholderne skal holdes tæt lukket.



Reklamationsret, garanti/ansvarsfrihed

Anvendelsestekniske anbefalinger, uafhængigt af om de tildeles mundtligt, skriftligt eller i forbindelse med en praktisk vejledning, gælder som retningsgivende. Vores produkter udvikles kontinuerligt. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre håndtering og sammensætning.

Kontrol af råemnerne

Råemnerne skal ubetinget kontrolleres for korrekt, optisk tilstand efter modtagelsen. Efter brug af et (transport-) beskadiget råemne, bortfalder ethvert reklamerationskrav.

Montering i arbejdsbordet



Monteringen af råemnerne er beskrevet i betjeningsvejledningen, der følger med den enkelte fræsemaskine.

Anvendelse

Indikationer

- _ Temporære for- og sidetandkroner, de kan bruges i maks. 3 år
- _ Temporære for- og sidetandbroer med maks. to forbundede mellemlid, de kan bruges i maks. 3 år
- _ Kontrol af pasningen på gipsmodellen/munden før den endelige behandling

Kontraindikationer

- _ Brokonstruktioner med mere end to forbundede mellemlid
- _ Brug til definitive restaurationer
- _ kendte uforeneligheder med bestanddelene
- _ alle indikationer, der ikke er angivet under „Indikationer“

Materialspecifikke fundamentparametre

Følgende materialspecifikke fundamentparametre skal overholdes, når der produceres restaurationer med Ceramill A-Temp:

Mindste vægtykkelse i mm		Forbindelsestværsnit i mm ²			
		Bro i fortand		Bro i sidetand	
okklusal	cirkulær	med et mellemlid	med to mellemlid	med et mellemlid	med to mellemlid
1,5	0,8	12	12	12	16



Udskillelse og udarbejdelse

- ▷ Til udskillelse og udarbejdelse af konstruktioner på basis af råemnet til krydsfortandede hårdmetalfræsere, der er egnet til kunststof, eller egnede skæreskiver.
- ▷ Poler kronekanter, okklusalflander og basale kontaktflader omhyggeligt, så de skinner.
- ▷ For at undgå unøjagtig pasning når konstruktionen er fremstillet: forhindr stor varmeudvikling under færdiggørelsen og poleringsarbejdet.

Blænde

Fræsede konstruktioner af Ceramill A-Temp kan blændes med almindelige blændematerialer.

- ▷ Brug helst materialer på basis af MMA.
- ▷ Læs og overhold producentens oplysninger fra blændematerialets udbyder.

Når der blændes med Composite, skal forbindelsen til Ceramill A-Temp altid gennemføres iht. den enkelte producents oplysninger.

Underfore

Konstruktioner af Ceramill A-temp kan til enhver tid underfores med alle almindelige koldpolymerisater på basis af MMA.

- ▷ Konditioner overfladen forinden, helst med et lignende koblingsmiddel på MMA basis.
- ▷ Læs og overhold producentens oplysninger fra underforematerialets udbyder.



Fastgørelse

_ provisoriske, Eugenol-frie cementer/fastgørelsesmaterialer

Miljøbeskyttelse

Emballage

Mht. emballage deltager producenten i de landespecifikke genanvendelsessystemer, der sikrer en optimal recycling.

Al emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, der kan genbruges.

Bortskaffelse af ræmnerne

Indholdet/beholderen skal bortskaffes iht. de lokale/regionale/internationale forskrifter.

Bortskaffelse iht. gældende forskrifter fra myndighederne.

Tilbehør

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


Yderligere informationer om produktspecifikt tilbehør findes under www.amanngirrbach.com.

Downloadinformationer

Yderligere vejledninger kan downloades under www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.









Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

Rx only

36004-FB 2019-07-10



AMANNGIRRBACH