



32957-FB 2016-08-30

DA

BRUGSVEJLEDNING Ceramill Splintec Standard

Oversættelse af den originale brugsvejledning Skal læses opmærksomt igennem!

FORMÅL

Ceramill Splintec Standard er PMMA råemner til at fræse udtagelige bidskinner, der konstrueres og produceres med et CAD/CAM system.

TEKNISKE DATA

FYSISKE VÆRDIER TIL CERAMILL SPLINTEC STANDARD

Kontrolleres for

Opløselighed	<0,8 µg/mm ³
Vandoptagelse	<20 µg/mm ³
Bøjemodul	2200 MPa
Bøjestykke	>100 MPa
Restmonomerindhold	<0,7%

SAMMENSÆTNING

- _ Polymethylmethacrylat (PMMA)
- _ EDMA og fluorescent

FARVE

Clear (gennemsigtig)

OPBEVARING

Skal beskyttes mod direkte solstråler og opbevares ved stuetemperatur.

FAREHENVISNINGER

Når Ceramill Splintec Standard råemner bearbejdes, opstår der støv, der kan føre til irritation af øjne, hud og luftveje. Vær derfor altid opmærksom på, at op sugningen fungerer korrekt på fræsemaskinen.

Yderligere sikkerhedsrelevante henvisninger fremgår af sikkerhedsdatabladet.

BÆRETID

I op til 6 måneder

UDARBEJDELSE

_ Krydsfortandede hårdmetalfræsere, der er egnet til kunststof, eller egnede skæreskiver anvendes til efterbearbejdning og udtagning af bidplansskinner fra råemnet.

_ Stor varmeudvikling bør undgås under færdiggørelsen og poleringsarbejdet for at undgå, at arbejdet ikke passer efter bearbejdningen.

Vigtige henvisninger: Undgå overophedning under bearbejdning og politur!
Medicinprodukt til engangsbrug!

GENDANNELSE

Bidplansskinner, der er blevet fremstillet af Ceramill Splintec Standard råemner, kan til enhver tid gendannes og suppleres igen med alle almindelige koldpolymerisater på basis af MMA.

SÆRLIGE HENVISNINGER

LOT-nr. skal angives til hvert arbejde, der kræver en identifikation af materialet.

FORSIGTIG: Desinfektion skal gennemføres med ultraviolet stråling, ikke i autoklaven.

HOLDBARHED

10 år fra produktionsdato.

BORTSKAFFELSE

Ceramill Splintec Standard er vandopløselig, inaktiv, udsætter ikke grundvandet for fare og kan derfor smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

SIKKERHEDSDATABLADE / OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Sikkerhedsdatablade og overensstemmelseserklæringer fås ved forespørgsel og under www.amanngirschbach.com


Produktegenskaberne baserer på en overholdelse og iagttagelse af denne brugsinformation.

 Chargekode

 Artikelnummer

 Producent

 Brugsanvisning skal overholdes

 Kan bruges indtil

 Serienummer