

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com

Achtung
Warning
Attenzione
Atención



AMANNGIRSBACH

33557-FB 201612-05

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ CERAMILL PONTIC

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Στα υλικά μοντελισμού Ceramill πρόκειται για πλαστικά υλικά μοντελισμού σκληραινόμενα από την επίδραση του φωτός στις συνεκτικότερες ρευστή και εύπλαστη.

Το Ceramill Pontic (760522) είναι εύπλαστο και χρησιμοποιείται στο μοντελισμό συνδετήρων για γέφυρες. Για τη μόνωση γύψου ή, ανάλογα, διαχωριστικού βερνικιού απέναντι στο υλικό μοντελισμού χρησιμοποιεί η εναρμονισμένη στο υλικό μοντελισμού μόνωση Ceramill Sep (760561).

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ


Μήκος κύματος πολυμερισμού 400-500 nm

Χρόνος πολυμερισμού 7 sec

Βάθος πολυμερισμού ≤ 1mm

Τα στοιχεία ισχύουν για Ceramill Pontic με βάση επεξεργασία σε θερμοκρασία δωματίου,

Κατά κανόνα κατά τη διάρκεια του πολυμερισμού τα στο φως σκληραινόμενα υλικά συρρικνώνονται.

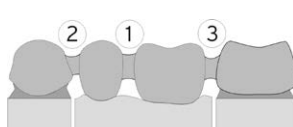

Συνδέστε πρώτα μεταξύ τους τους συνδετήρες των γεφυρών από Ceramill Pontic ①. Μετά την ολοκλήρωση του πολυμερισμού στερεώστε το ένα μετά το άλλο με Ceramill Gel στα τερματικά στηρίγματα ② και ③.

Ο σκελετός από πλαστικό υλικό μπορεί, σε περιπτώσεις πολύπλοκων εργασιών, ή όταν το design του σκελετού δεν είναι σαφές, η προσαρμογή του σκελετού να ελεγχθεί τοποθετώντας τον για λίγο στο στόμα που ασθενή. Ο έλεγχος αυτός, δηλαδή η τοποθέτηση στο στόμα του ασθενή, δεν διεξάγεται οπωσδήποτε σε κάθε σε κάθε εργασία και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Υποδείξεις για την αποθήκευση Θερμοκρασία της αποθήκευσης όχι υψηλότερη από 25 °C. Να διατηρείτε την αυθεντική συσκευασία διαρκώς στεγανά κλειστή. Μην εκθέτετε το προϊόν στο φως.

Σταθερότητα αποθήκευσης: 4 έτη.

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΣ

Ασθενής και χρήστης Τα υλικά μοντελισμού Ceramill μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες. Χρήστης Η συχνή ή η διαρκής επαφή με μη πολυμερισμένα υλικά μπορεί να ερεθίσουν την επιδερμίδα.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Δεν είναι γνωστή καμιά αλληλεπίδραση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ασθενής και χρήστης Τα υλικά μοντελισμού Ceramill δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν εξακριβωθεί κάποια αλλεργία σε ένα από τα περιεχόμενα υλικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος; Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. Απόσυρση του περιεχομένου/του δοχείου σύμφωνα με τις τοπικές/εθνικές/διεθνείς διατάξεις.

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ / ΕΥΘΥΝΗΣ:

Τεχνικές συστάσεις, που παρέχονται προφορικά, γραπτά ή μέσα σε πλαίσιο πρακτικής καθοδήγησης ισχύουν ως οδηγίες Τα προϊόντα μας εξελίσσονται διαρκώς. Γι' αυτό επιφυλασσόμαστε για τυχόν αλλαγές στο χειρισμού και τη σύστασή τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	Pontic
Αντοχή σε κάμψη	40 MPa
Ελαστική μονάδα	1000 MPa
Τάση θραύσης	12 %
Χρώμα	μπλε

Χημική σύσταση:

Ceramill Pontic: οδοντοτεχνικά υλικά μοντελισμού, σκληραινόμενα σε μεθακρυλική βάση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

760522	Ceramill Pontic – Πακέτο με 2 τμχ
760561	Ceramill Sep – Μόνωση γύψου ή, ανάλογα, διαχωριστικού βερνικιού απέναντι στο υλικό μοντελισμού

Για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας μπορείτε να μας ρωτήσετε ή να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα

www.amanngirschbach.com.

LOT Κωδ. παρτίδας

REF Κωδ. αριθ.

🏭 Κατασκευαστής

📖 Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

📅 Ημερομηνία λήξης

🌡️ Περιορισμός θερμοκρασίας

⚠️ Προσοχή

🌿 Περιβαλλοντικός κίνδυνος