



32957-FB 2016-08-30

EL

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ceramill Splintec Standard

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά!

### ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Τα Ceramill Splintec Standard είναι ακατέργαστα τεμάχια PMMA σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για το φρεζάρισμα αφαιρούμενων ναρθήκων με συστήματα CAD/CAM.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ STANDARD CERAMILL SPLINTEC

#### Έλεγχος κατά

Διαλυτότητα	< 0,8 µg / mm <sup>3</sup>
Απορρόφηση νερού	< 20 µg / mm <sup>3</sup>
Μονάδα κάμψης	2200 MPa
Αντοχή σε κάμψη	> 100 MPa
Περιεκτικότητα σε υπολειμματικό μονομερές	< 0,7%

### ΣΥΣΤΑΣΗ

- \_ Πολυμεθακρυλικό μεθυλένιο (PMMA)
- \_ EDMA και φθορισμός

### ΧΡΩΜΑ

Clear (διαφανές)

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και να αποθηκεύεται υπό θερμοκρασία δωματίου.

### ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κατά την κατεργασία ακατέργαστων τεμαχίων Ceramill TEMP δημιουργούνται σκόνες που μπορεί να ερεθίσουν τα μάτια, το δέρμα και τις αναπνευστικές οδούς. Γι' αυτό να φροντίζετε να λειτουργεί πάντα άριστα η αναρρόφηση στη μηχανή σας φρεζαρίσματος. Περισσότερες σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Έως 6 μήνες.

### ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

- \_ Για συμπληρωματικές εργασίες και για την κοπή αφαιρούμενων ναρθήκων από το ακατέργαστο τεμάχιο πρέπει για το πλαστικό να χρησιμοποιείτε κατάλληλες φρέζες από σκληρομέταλλο με σταυρωτή οδόντωση ή με κατάλληλους δίσκους κοπής
- \_ Κατά την τελική επεξεργασία να αποφεύγετε την δημιουργία θερμότητας. Έτσι αποφεύγονται ανακρίβειες προσαρμογής μετά την κατασκευή των σκελετών.

**Σημαντικές υποδείξεις:** Κατά την κατεργασία και τη στίλβωση να αποφεύγετε τη δημιουργία υψηλών θερμοκρασιών. Ιατρικό προϊόν για χρήση μιας φοράς!

### ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Αφαιρούμενοι νάρθηκες που κατασκευάστηκαν από ακατέργαστα τεμάχια από Ceramill Splintec Standard μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακτηθούν και να συμπληρωθούν με όλα τα ψυχρά ακρυλικά πολυμερισμού από το κοινό εμπόριο σε βάση MMA.

### ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Σε κάθε διαδικασία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός LOT που απαιτεί μια αναγνώριση υλικού. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απολύμανση πρέπει να διεξάγεται με υπεριώδη ακτινοβολία, όχι σε αυτόκλειστα.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

10 έτη από την ημερομηνία κατασκευής

### ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Το Ceramill Ceramill Splintec Standard δε διαλύεται στο νερό, είναι ανενεργό, δεν ελλοχεύει κινδύνους για τα υπόγεια νερά και γι' αυτό μπορεί να αποσυρθεί μαζί με τα απορρίμματα του σπιτιού σας.

### ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τις δηλώσεις συμμόρφωσης μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com).

**Οι ιδιότητες του προϊόντος βασίζονται στην εκπλήρωση και την τήρηση της παρούσας πληροφορίας χρήσης.**

**LOT** Κωδ. παρτίδας

**REF** Κωδ. αριθ.

Κατασκευαστής

Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Ημερομηνία λήξης

**SN** Αριθμός σειράς