

## Használati utasítás

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Gírrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001



AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS CERAMILL D-WAX

Az eredeti kezelési útmutató fordítása

### A TERMÉK RENDELTETÉSE

Viasz teljes protézis alapok Ceramill Motion 2 CNC marógépben való megmunkáláshoz (5x).

### A TERMÉK LEÍRÁSA

A Ceramill D-WAX egy az orvosi termékek 1. osztályához tartozó rózsaszínű viasz nyersdarab. A viasz teljes protézis alapok készítésére és felpróbálására szolgál és a Ceramill Motion 2 CNC marógépben (5x) vízűtés mellett mintkét oldalon megmunkálásra kerül. A viasz átállításhoz, illetve a paciensenél végrehajtott felpróbálás utáni alkalmazásra használható.

### MŰSZAKI ADATOK

Színe:	rózsaszín	
Fagyáspont:	84 °C	ISO 2207
Viszkózitás 120 °C mellett:	< 50 mPas	DIN 53019
Vízben való oldhatóság:	nem oldható	
Gyúléspont:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Sűrűség 20 °C mellett:	kb. 0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Szag:	gyenge, jellegzetes	

### KÉMIAI ÖSSZETÉTEL

Szénhidrogén viaszok, természetes viaszok, színezőanyagok.

### KISZERELÉSEK

760570	Ceramill D-WAX	H = 30 mm	Fogív alakú
--------	----------------	-----------	-------------

### TÁROLÁS

Óvja meg a viasz blokkokat a közvetlen napsugárzás behatásától. Az eredeti csomagolásban és egy hűvös, jól szellőztetett helyen tárolja.

### FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termikus megmunkálás esetén gondoskodjon a gőzök elszívásáról és a kielégítő szellőzéstől. A forró, megolvadt anyag égési sérüléseket okozhat. A megmunkálás során viseljen személyes védő ruhát (porvédő álarc, védőszemüveg, védőkesztyű, védőköpeny).

### JAVALLATOK

- \_ Egy olyan protézis alap marással való megmunkálásához, amelyet a felpróbáláshoz a paciens szájába lehet tenni.
- \_ Hideg és forró polimerizátumok beágyazásos eljárással való megmunkálásához.

### TARTÓSSÁG

A gyártási dátumtól kezdve 3 év.

### TISZTÍTÁS A MARÁS UTÁN

A marás után a protézis alapot egy hideg vízzel megnedvesített kendővel meg kell tisztítani a hűtőfolyadék foltoktól.

A szűkebb területekhez, amelyekhez egy kendővel nem lehet hozzáférni, egy puha szálakkal ellátott fogkefét lehet használni.

### HULLADÉKKEZELÉS

Általában a közönséges háztartási szemétként lehet dobni. A helyi hatósági előírásoknak megfelelően például egy megfelelő égető berendezésnél lehet leadni.

### SZAVATOSSÁG

Az alkalmazástechnikai javaslatok, akár szóban, akár írásban, akár egy gyakorlati bevezetés kereteiben kerülnek átadásra, saját tapasztalatainkon és kísérleteinken alapulnak és ezért csak irányelvként használhatók. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. A termékek szerkezetének és összetételének bármikori megváltoztatására ezért minden jog fenntartva.

### BIZTONSÁGI ADATLAPOK / KONFORMITÁSI NYILATKOZAT

A biztonsági adatlapok és a konformitási nyilatkozat kérésre megkaphatóak és a [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com) honlapon is megtalálhatók.

**LOT** Gyártási adag kódja

**REF** Cikkszám

**🏭** Gyártó

**📖** Vegye figyelembe a Használati útmutatót!

**Rx only** A terméket az U.S.A Szövetségi Törvényének megfelelően csak egy fogorvos adhatja el, vagy egy fogorvos megbízása alapján szabad eladni.

**🕒** Felhasználási határidő

**SN** Gyári szám