

Kezelési Útmutató

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com

Achtung
Warning
Attenzione
Atención

AMANNGIRSBACH

Made in the European Union

CE



33557-FB 201612-05

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CERAMILL PONTIC

Az eredeti kezelési útmutató fordítása

A TERMÉK LEÍRÁSA

A Ceramill modellező anyagok fény hatására keményedő modellező műanyagok, melyek konzisztenciája higan folyó vagy gyúrható.


A Ceramill Pontic (760522) gyúrható állagú és hídtestek modellezésére szolgál. A gipsznek, illetve a csonklakknak a modellező műanyagtól való elszigetelésére a modellező műanyagok jól megfelelő Ceramill Sep (760561) szigetelés használható.

KEZELÉS

| | |
|----------------------------|--------------|
| Polimerizációs hullámhossz | 400 - 500 nm |
| Polimerizációs idő | 7 sec |
| Polimerizációs mélység | ≤ 1mm |

Az adatok a Ceramill Pontic szobahőmérsékleten való feldolgozására vonatkoznak.

A fény hatására kikeményedő műanyagok a polimerizáció során alapvetően zsugorodnak.

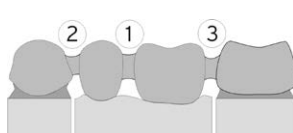

A Ceramill Ponticből készül hídtesteket először csak egymás között ① kösse össze. A végleges polimerizáció után egymás után rögzítse Ceramill Gel-lel a végeken elhelyezkedő ② és ③ pillérhez.

Így megelőzheti a váz lehetséges megvetemedését.

A műanyag vázat nagyobb munkák esetén, vagy ha a váz kialakítása nem egyértelmű, az illeszkedés ellenőrzéséhez átmenetileg be lehet helyezni a paciens szájüregébe.

Ezt a próbát, vagyis a behelyezést a paciens szájüregébe, alapvetően nem kell minden munkánál elvégezni, és ez csak néhány percig tart.

TÁROLÁS

Tárolási előírások: Ne tárolja 25 °C feletti hőmérsékleteken.

Az eredeti csomagolásban szorosan lezárva tárolja. Óvja meg a fény hatásától. **Minőségét a tárolás során megőrzi: 4 évig.**

MELLÉKHATÁSOK

Paciens és felhasználó: A Ceramill modellező anyagok allergiás reakciókat okozhatnak. Felhasználó: A még polimerizálatlan anyagnak a bőrrel való gyakori és tartós érintkezése a bőrfelület sérüléseihez vezethet

KÖLCSÖNHATÁSOK

Kölcsönhatások nem ismeretesek.

ELLENJAVALLATOK

Paciens és felhasználó: A Ceramill modellező anyagokat nem szabad használni, ha ismert allergia áll fenn valamelyik alkotórésszel szemben.

FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK

ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Tartsa be a biztonsági adatlapon található utasításokat. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. A tartalmat / a tartályt a helyi/regionális/országos/nemzetközi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A SZAVATOSSÁG /

A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A felhasználási technikára vonatkozó ajánlások, függetlenül attól, hogy ezek szóban, írásban, vagy egy gyakorlati oktatás keretében kerültek átadásra, irányelveknek számítanak. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. A termékek kezelési módjának és összetételének bármikori megváltoztatására minden jog fenntartva.

MŰSZAKI ADATOK

| | Pontic |
|----------------------|---------------|
| Hajlítási szilárdság | 40 MPa |
| Rugalmassági modul | 1000 MPa |
| Törési alakváltozás | 12 % |
| Szín | kék |

Kémiai összetétel:

Ceramill Pontic: fény hatására kikeményedő, metakrilátalapú fogászati modellező műanyagok

ACSOMAGOLÁSOK / TARTOZÉK

| | |
|--------|---|
| 760522 | Ceramill Pontic – 2 darabos csomag |
| 760561 | Ceramill Sep – Szigetelés a gipsz, illetve a csonklakk elszigetelésére a modellező műanyagtól |

A biztonsági adatlapok kérésre megkaphatóak és a www.amanngirschbach.com honlapon is megtalálhatók.

LOT Gyártási adag kódja

REF Cikkszám

Gyártó

Vegye figyelembe a Használati útmutatót!

Felhasználási határidő

Hőmérséklet korlátozás

Figyelem

Környezeti veszély