
 Naudojimo instrukcija


 Manufacturer | Hersteller
 Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
 Herrschaftswiesen 1
 6842 Koblach | Austria
 Fon +43 5523 62333-105
 Fax +43 5523 62333-5119
 austria@amanngirschbach.com
 www.amanngirschbach.com

 Achtung
 Warning
 Attenzione
 Atención


 Made in the European Union




 AMANNGIRSBACH

33557-FB - 201612-05

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
CERAMILL PONTIC

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PRODUKTO APRAŠAS

Ceramill modeliavimo medžiagos yra šviesoje kietėjantys modeliavimo plastikai, tokios ir minkomos konsistencijos.


Ceramill Pontic (760522) yra minkomos konsistencijos ir yra naudojamas tiltelių tarpinėms grandims modeliuoti. Gipsui ir danties likučio lakui izoliuoti nuo modeliavimo plastiko naudojama modeliavimo plastikui priderinta izoliacijos priemonė Ceramill Sep (760561).

NAUDOJIMAS

Polimerizacijos bangų ilgis	400 - 500 nm
Polimerizacijos laikas	7 sec
Polimerizacijos gylys	≤ 1mm

Duomenys galioja Ceramill Pontic, apdorojant kambario temperatūroje.

Šviesoje kietėjantys plastikai susitraukia polimerizacijos metu. Norint sumažinti šį efektą, modeliavimo plastiką tepti reikia palaipsniui.

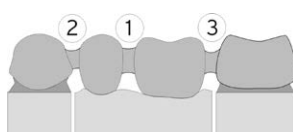

Tiltelio tarpinės grandis iš Ceramill Pontic pirmiausia sujunkite tarpusavyje ①. Po visiškos polimerizacijos tada paeiliui fiksokite su Ceramill Gel prie galinių atramų ② ir ③.

Taip išvengsite karkaso išsikaipymo. Plastikinį karkasą, kai atliekami dideli darbai arba kai yra sudėtingas karkaso dizainas, priderinimo patikrinimui laikinai galima įstatyti į paciento burnos ertmę. Šis bandymas, t. y., taikymas paciento burnoje, atliekamas ne per kiekvieną darbą ir trunka tik kelias minutes.

SANDĖLIAVIMAS

Sandėliavimo nuorodos: Nelaikykite aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje. Originalią pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Saugokite nuo šviesos. **Sandėliavimo stabilumas: 4 metų.**

PAŠALINIAI POVEIKIAI

Pacientas ir naudotojas: Ceramill modeliavimo medžiagos gali sukelti alergines reakcijas. Naudotojas: dažnas ir ilgalaikis odos sąlytis su nepolimerizuota medžiaga gali sudirginti odą.

SĄVEIKA

Nėra žinomų sąveikų.

KONTRAINDIKACIJOS

Pacientas ir naudotojas: Ceramill modeliavimo medžiagos nereiktų naudoti, jei yra žinoma alergija vienai iš sudėtinių medžiagų.

ĮSPĖJAMAI IR SAUGOS NURODYMAI

Atsižvelkite į saugos duomenų lapą. Var izraisit alergisku ādas reakciju. Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Izvairities ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu. Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Izvairities no izplatīšanas apkārtējā vidē. Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Utilizējiet saturu/tvertni atbilstoši vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

ĮSTATYMINĖ GARANTIJA / ATSAKOMYBĖS RIBOS

Naudojimo technikos rekomendacijos žodžiu, raštu ar praktinio instruktažo metu galioja kaip direktyva.

Mūsų produktai ir toliau nuolat tobulinami. Todėl pasiliekaime teisę keisti jų konstrukciją ir sudėtį.

TECHNINIAI DUOMENYS

	Pontic
Atsparumas lenkimui	40 MPa
Elastingumo modulis	1000 MPa
Ištįsa nutrūkimo momentu	12 %
Spalva	mėlyna

Cheminė sudėtis:

Ceramill Pontic: šviesoje kietėjantys modeliavimo plastikai metakrilato pagrindu.


PAKUOTĖS / REIKMENYS


760522	Ceramill Pontic – Pakuot. po 2 vnt.
760561	Ceramill Sep – Gipso arba danties likučio lako izoliacija nuo modeliavimo plastiko


Saugos duomenų lapai pateikiami paprašius, taip pat juos galima rasti tinklalapyje www.amanngirschbach.com.


 Partijos numeris

 Prekės numeris

 Gamintojas

 Laikykitės naudojimo instrukcijos

 Tinka naudoti iki

 Temperatūros ribojimas

 Dėmesio

 Pavojus aplinkai