



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Ceramill Splintec Standard

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas. Atidžiai perskaitykite!

PASKIRTIS

Ceramill Splintec Standard yra PMMA ruošiniai, skirti sąkandžių kapoms, konstruojamoms ir gaminamoms su CAD/CAM sistema rezuoti.

TECHNINIAI DUOMENYS

FIZIKINĖS CERAMILL SPLINTEC STANDARD SAVYBĖS

Tikrinama savybė

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Tirpumas | < 0,8 µg/mm ³ |
| Vandens sugertis | < 20 µg/mm ³ |
| Jungo modulis | 2200 MPa |
| Atsparumas lenkimui | > 100 MPa |
| Likutinis monomero kiekis | < 0,7% |

SUDĖTIS

- _ Polimetilmetakrilatas (PMMA)
- _ EDMA ir fluorescentas

SPALVA

Skaidri (permatoma)

SANDĖLIAVIMAS

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių ir laikykite kambario temperatūroje.

NUORODOS APIE PAVOJUS

Apdirbant Ceramill Splintec Standard ruošinius, susidaro dulkės, galinčios dirginti akis, odą ir kvėpavimo takus. Užtikrinkite, kad visada nepriekaištingai veiktų jūsų frezavimo mašinos dulkių nusiurbimo įtaisai.

Kitas su sauga susijusias nuorodas skaitykite saugos duomenų lapė.

NAUDOJIMO TRUKMĖ

Iki 6 mėnesių.

BAIGIAMASIS APDAILINIMAS

_ Papildomam apdorojimui ir sukandiminių kapų išpjovimui iš ruošinio naudotinos plastikams apdoroti skirtos, kryžmiškai dantytos kietmetalio frezavimo galvutės arba tam skirti abrazyviniai pjovimo diskai.

_ Kad pagamintas gaminys tiksliai tiktų, atliekant baigiamąjį apdailinimą ir poliruojant reikia vengti įkaitimo.

Svarbūs nurodymai: apdirbdami ir poliruodami saugokite, kad neperkaistų! Medicinos produktas vienkartiniam naudojimui!

ATSTATYMAS

Iš Ceramill Splintec Standard ruošinių pagamintas sukandimines kapas bet kada galima atstatyti ar papildyti naudojant rinkoje paplitusius šaltuosius polimerus MMA pagrindu.

YPATINGOS NUORODOS

Jei kreipiatės su klausimu, dėl kurio reikės identifikuoti medžiagą, visada nurodykite partijos (LOT) numerį. **ATSARGIAI:** Dezinfekuoti reikia ultravioletine spinduliuote, ne autoklave.

TINKAMUMAS NAUDOTI

10 metų nuo pagaminimo datos.

ŠALINIMAS


Ceramill Splintec Standard yra netirpus vandenyje ir neaktyvus, nekelia pavojaus gruntiniams vandenims, todėl jį galima šalinti su buitinėmis atliekomis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI / ATITIKTIES DEKLARACIJA

Saugos duomenų lapai ir atitikties deklaracija pateikiami paprašius, taip pat juos galima rasti tinklalapyje www.amanngirschbach.com.

Gaminio savybės aprašytos preziūmuojant, kad bus atsizvelgiama į naudojimo instrukciją ir laikomasi jos reikalavimų.

 Partijos numeris

 Prekės numeris

 Gamintojas

 Laikykitės naudojimo instrukcijos

 Tinka naudoti iki

 Serijos numeris