



## LIETOŠANAS PAMACĪBA Ceramill Splintec Standard

Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums Lūdzam lasīt uzmanīgi!

### PIELIETOJUMS

Ceramill Splintec Standard ir PMMA sagataves izņemamo sakodienu stieņu izfrēzēšanai, kuru konstruēšanai un izgatavošanai tiek izmantota CAD/CAM sistēma.

### TEHNISKIE DATI

FIZIKALIE PARAMETRI SAGATAVĒM CERAMILL SPLINTEC STANDARD

#### Pārbaužu rezultāti šādiem parametriem

Šķidība	< 0,8 μg/mm <sup>3</sup>
Ūdens uzņemšana	< 20 μg/mm <sup>3</sup>
Elastības modulis	2200 MPa
Lieces izturība	> 100 MPa
Paliekošo monomēru saturs	< 0,7%

### SASTAVS

- \_ Polimetilmetakrilāts (PMMA)
- \_ EDMA un fluorescents

### KRASA

Caurspīdīgs

### UZGLABAŠANA

Sargājiet no tiešas saules starojuma iedarbības un uzglabājiet pie istabas temperatūras.

### BRĪDINAJUMI PAR BĪSTAMĪBU

Apstrādājot sagataves Ceramill Splintec Standard, veidojas putekļi, kas var izraisīt acu, ādas un elpošanas ceļu kairinājumu. Šajā sakarā vienmēr sekojiet, lai nevainojami darbotos frēzes putekļu uzsūkšanas ierīce.

Ar citiem ieteikumiem, kas saistīti ar darba drošību, lūdzam iepazīties drošības datu lapā.

### NĒSAŠANAS ILGUMS

Līdz 6 mēnešiem

### GALA APSTRADE

\_ Veicot sakodienu šīnu pēcapstrādi vai atdališanu no sagataves, jālieto plastmasas apstrādei piemērotas krustzobu cietmetāla frēzes vai piemēroti griešanas diski.

\_ Lai novērstu gatavā izstrādājuma iespējamo neprecizitāti un neiederību, tā pēcapstrādes un pulēšanas laikā nav pieļaujama stipra siltuma izdalīšanās.

**Svarīgi norādījumi:** Apstrādes un pulēšanas laikā nepieļaujiet izstrādājuma pārkaršanu! Medicīnas izstrādājums vienreizējai lietošanai!

### ATKARTOTA IZGATAVOŠANA

No sagatavēm Ceramill Splintec Standard izgatavotās sakodienu šīnas var jebkurā brīdī pārveidot un papildināt, pielietojot jebkuru no izplatītākajām aukstuma polimerizācijas metodēm uz MMA bāzes.

### ĪPAŠI NORADĪJUMI

Veicot jebkuru procedūru, kurai nepieciešama materiāla identifikācija, pierakstiet un saglabājiet materiāla partijas numuru. UZMANĪBU! Dezinfekcija jāveic, pielietojot ultravioleto starojumu, bet ne autoklāvā

### DERĪGUMS

10 gadi, skaitot no izgatavošanas datuma.

### UTILIZĒŠANA

Sagataves Ceramill Splintec Standard sastāv no ūdeni nešķīstoša un neaktīva materiāla, kas nekādā veidā neapdraud gruntsūdeņus, tāpēc no tām var atbrīvoties, izmetot parastajā sadzīves atkritumu tvertnē.

### LAPAS AR DROŠĪBAS DATIEM / DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM

Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc pieprasījuma vai arī izlasīt, atverot interneta vietni [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

**Izstrādājuma īpašības nosaka šajā lietošanas pamācībā sniegto norādījumu ievērošana.**

**LOT** Partijas kods

**REF** Artikula numurs

Ražotājs

Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus

Izmantojams līdz

**SN** Sērijas numurs