

girobond[®]soft

LV Lietošanas pamācība

**Zobu tehniskais ķarstais sakausējums
uz CoCrMo bāzes, tips 4 atbilstoši
standartam ISO 22674, pastāvīgajām
un izņemamajām zobu protēzēm**

Kroņiem un tiltiem



AMANN GIRRBACH

– Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums –

Satura rādītājs

Simbolu skaidrojums	4
Vispārēji drošības noteikumi	6
Personāls	6
Īpašības	7
Garantija / Atbildības ierobežojumi	9
Keramiskajam pārklājumam paredzēta kroņa/ tilta izgatavošana	10
Vispārēji norādījumi	13
Piestrāde pie zobārsta	14
Kontrole pie zobārsta	14
Vides aizsardzība	15
Piederumi	16
Informācija par lejupielādēm	16

LV



Simbolu skaidrojums

Brīdinošie norādījumi



Brīdinošie norādījumi tekstā ir ierāmēti un atzīmēti un brīdinošu trijstūri ar tajā attēlotu izsaukuma zīmi.



Ja pastāv elektriskās strāvas iedarbības briesmas, brīdinošajā trijstūrī izsaukuma zīmes vietā tiek attēlots zibens simbols.

Katra brīdinošā norādījuma sākumā atrodas signālvārds, kas norāda uz seku veidu un smagumu gadījumā, ja netiks ievērots attiecīgais norādījums briesmu novēršanai.

- _ **IEVĒRĪBAI** nozīmē, ka var tikt bojātas materiālās vērtības.
- _ **UZMANĪBU** nozīmē, ka var tikt nodarīts viegls vai vidēji smags kaitējums cilvēku veselībai.
- _ **BRĪDINAJUMS** nozīmē, ka var tikt nodarīts smags kaitējums cilvēku veselībai.
- _ **BRIESMAS** nozīmē, ka var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība.

Svarīga informācija






Svarīga informācija, kuras neievērošana neapdraud cilvēkus un materiālās vērtības, ir atzīmēta ar šeit attēloto simbolu. Arī šāda veida teksts ir ierāmēts.



Citi simboli pamācībā

Simbols	Nozīme
▷	Punkts kādas darbības aprakstā
—	Punkts kādā sarakstā
•	Apakšpunkts kādas darbības aprakstā vai kādā sarakstā
[3]	Skaitlis kvadrātiekvās norāda uz apzīmējumu grafiskajā attēlā

Citi simboli uz izstrādājuma

Simbols	Nozīme
MD	Medicīniska ierīce
UDI	Ierīces unikālais identifikators
REF	Artikula numurs
LOT	Partijas kods
	Ražotājs
	Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus
	Izgatavošanas datums

Vispārēji drošības noteikumi



UZMANĪBU:

Apstrādājot konstrukcijas, kas izgatavotas no Girobond Soft, var veidoties putekļi, kas var izraisīt mehānisku acu un elpošanas ceļu kairinājumu.

- ▷ Veicot individuālo piestrādi, vienmēr sekojiet, lai nevainojami funkcionētu uzsūkšanas sistēma frēzēšanas iekārtā un darba vietā.
- ▷ Apstrādes laikā nēsājiet individuālos aizsarglīdzekļus (putekļu aizsargmasku, aizsargbrilles u.c.).
- ▷ Ar citiem ieteikumiem, kas saistīti ar darba drošību, lūdzam iepazīties drošības datu lapā.



IEVĒRĪBAI:

Par visiem nopietnajiem starpgadījumiem, kas saistīti ar izstrādājumu, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

Personāls



IEVĒRĪBAI:

Izstrādājumu drīkst apstrādāt tikai kvalificēti zobu tehniķi vai zobārsti.



Īpašības

Vispārēji norādījumi

- _ Tips 4 (ISO 22674): Īpaši augsta izturība - pielietojumiem, kur materiāls tiek pakļauts ļoti lielām slodzēm, tādi, piemēram, ir atsevišķie aklie kroņi, platleņķa tilti vai tilti ar mazu šķērsriezuma laukumu, stieņi, stiprinājumi un uz implantiem balstītas konstrukcijas
- _ laba plūstamība un iespēja apstrādāt ar jebkuru zobārstniecības tehnoloģijā izplatītu liešanas paņēmieni
- _ stipri zema cietība (280 HV 10), kas ļauj viegli veikt frēzēšanu un pulēšanu
- _ augsta stabilitāte un izturība
- _ augsta drošība attiecībā uz pārklājumu noturību un bioloģisko savietojamību

Kontrindikācijas

- ▷ Var būt vērojama zināma nepanesamība attiecībā pret sakausējuma sastāvdaļām.

Blakus iedarbība

Retos gadījumos ir iespējama alerģija pret sakausējuma sastāvdaļām, kā arī elektroķīmisks diskomforts.

Drošības dati / Atbilstības deklarācija

Drošības datu lapu var lejupielādēt no Amann Girrbach interneta vietnes, izmantojot īsceļu *Services > Downloads > Additional Documents (Pakalpojumi > Lejupielādes > Papildu dokumenti)*. Izstrādājuma atbilstības deklarācija pēc pieprasījuma ir pieejama pie ražotāja.



Tehniskie dati

(ISO 22674 un ISO 9693)

	Vienība
Tecēšanas robeža (Rp 0,2)	500 MPa
Stiepes izturība (Rm)	700 MPa
E modulis (E)	200 GPa
Pagarinājums pārraušanas brīdī	15 %
Cietība pēc Vickersa	280 HV10
Kušanas intervāls	1370 °C (ciets) – 1415 °C (šķidr)
Liešanas temperatūra	1500 °C
Blīvums	8,5 g/cm ³
Termiskais izplešanās koeficients (WAK)	
_ 25 - 500 °C	14,0 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
_ 25 - 600 °C	14,2 × 10 ⁻⁶ K ⁻¹
Krāsa	sudrabaina
Oksīda krāsa	pelēka
Bioloģiskā saderība	Noturība pret koroziju atbilstoši standartam ISO 10271 Biosaderība atbilstoši standartam ISO 10993-1 Noturība pret apsūbējumu atbilstoši standartam EN ISO 22674



Ķīmiskais sastāvs, masas procentos

Kobalts	Co	62,2
Hroms	Cr	28,0
Volframs	W	5,0
Molibdēns	Mo	3,0
Silīcijs	Si	1,3
Citi elementi	Mn, N	< 1,0

Šis izstrādājums ir „bezniķeļa“, un kas nozīmē, ka Ni saturs tajā nepārsniedz 0,1 % (masas daļa), kas atbilst standartā ISO 22674 noteiktajām prasībām.

Derīgums

Izstrādājums ir derīgs 5 gadus. skaitot no izgatavošanas datuma.

Uzglabāšana

▷ Uzglabāt pie istabas temperatūras sausā vietā.

Garantija / Atbildības ierobežojumi

Ar lietošanu saistīti tehniskie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un veiktajiem pētījumiem, tāpēc tie var kalpot vienīgi kā vadlīnijas, neatkarīgi no tā, vai šie ieteikumi tiek izplatīti mutiski, rakstiski vai praktiskas apmācības ceļā. Mūsu izstrādājumi tiek nepārtraukti pilnveidoti. Tāpēc mēs rezervējam tiesības mainīt izstrādājuma konstrukciju un montāžas veidu.



Keramiskajam pārklājumam paredzēta kroņa/tilta izgatavošana

Modelēšana

- ▷ Iegremdējiet vāciņu; sienīņu biezums 0,3 – 0,5 mm.
- ▷ Modelēšanas gaitā centieties veidot nemainīga biezuma keramikas pārklājuma slāni ar maksimālo biezumu 2 mm.

Liešanas kanālu izkārtojums

- ▷ Izmantojiet šķērsstieni vai gredzenveida kanālu ar biezumu 5 mm.
- ▷ Augstākajā punktā nostipriniet ieliešanas kanālu ar Ø 3 mm un garumu 2 mm. Veidojiet pakāpeniskas pārejas.

Ieguldīšana

- ▷ Izvietošana mufelī Lielajos mufeļos (6 un 9) izmantojiet divus līmeņus.
- ▷ Ievietojiet modeli mufelī centriski. Šķērsstienim sildīšanas centrā jāatrodas vienādā attālumā no mufeļa malas.
- ▷ Apstrādājiet ieguldīšanas masu atbilstoši ražotāja sniegtajiem norādījumiem. Ieteicamā ieguldīšanas masa – Giroinvest Super.

Priekšsildīšana

- ▷ Izlīdziniet vasku.
- ▷ Atbilstoši datiem izvēlieties uzsildīšanas pakāpi ieguldīšanas masas sagatavošanai.
- ▷ Izvēlieties uzsildīšanas laiku pie gala temperatūras atkarībā no mufeļa lieluma. Izvēlieties gala temperatūru atbilstoši ražotāja sniegtajiem norādījumiem (950 – 1050 °C).



Liešana (liešanas temperatūra apt. 1500 °C, kušanas intervāls 1370 – 1415 °C)



Ja tīģelis tiek priekšsildīts krāsnī, saīsinās kausēšanas process.

- ▷ Neizmantojiet kausēšanas tīģeli citiem sakausējumiem.
- ▷ Nepārkarsējiet sakausējumu.
- ▷ Lai nodrošinātu vajadzīgās sakausējuma īpašības, struktūras viendabīgumu un atkārtojamību, kausējiet vienīgi jaunu metālu.

- ▷ Levietojiet lejamā materiāla cilindru Girobond Soft keramiskajā kausēšanas tīģelī (1 kubs ~ 6 g).

Veicot liešanu ar atklātu liesmu:

- ▷ iestatiet deggāzes-skābekļa attiecību:
 - propāns-skābeklis ~ 0,7 : 1,4 bāri
 - acetilēns-skābeklis ~ 0,7 : 0,7 bāri
- ▷ Kausēšanas procesa laikā neattāliniet liesmu no sakausējuma.
- ▷ Pēc tam, kad lejamā materiāla kubi ir sabrukuši un kausējums zem liesmas spiediena ir kļuvis kustīgs: palaidiet liešanas procesu, pirms kausējums plīst.

Lietojot augstfrekvences liešanas mašīnas:

- ▷ Pēc tam, kad lejamā materiāla kubi ir sabrukuši un uz virsmas ir izzudis pēdējais apēnojums palaidiet liešanas procesu, pirms kausējums plīst.



Lietojot vakuuma-spiediena liešanas iekārtas:

- ▷ izkausējiet sakausējumu bez vakuuma pielietošanas. Iestatiet modeļa atliešanas programmu vai arī izslēdziet vakuumu vai to pēc iespējas samaziniet.
- ▷ Pēc tam, kad lejamā materiāla kubi ir sabrukuši un uz virsmas ir izzudis pēdējais apņojums palaidiet liešanas procesu, pirms kausējums plīst.
- ▷ Pēc liešanas ļaujiet mufelim lēni atdzist gaisā.

Izņemšana/Apstrāde

- ▷ Apstrādājiet karkasu ar alumīnija oksīda strūklu ar graudu izmēru 110 – 250 μm.
- ▷ Atgrieziet lējuma kanālu griešanas disku.
- ▷ Veiciet karkasa piestrādi ar cietmetāla (krustzobu) frēzi.

Metāla apstrāde pirms keramikas piekausēšanas

- ▷ Lietojot smalkas strūklas iekārtu, apstrādājiet karkasu ar tīru alumīnija oksīda strūklu ar graudu izmēru 110 – 250 μm pie strūklas spiediena 3 – 4 bāri.
- ▷ Vairs nepieskarieties karkasam ar pirkstiem, bet satveriet to ar artēriju spailēm.
- ▷ Apstrādājiet karkasu ar tvaiku.



Apstrādājot Girobond Soft, oksīda piededzināšana nav nepieciešama.

- ▷ Ja tas ir nepieciešams virsmas kontrolei, jāveic oksīda piededzināšana (temperatūra 1040 °C, izturēšanas laiks 1 – 2 minūtes).



**IEVĒRĪBAI:**

Ir iespējami karkasa bojājumi nepareizas apstrādes dēļ!

- ▷ **Nežāvējiet** karkasu ar saspiesta gaisa strūklu (eļļa, neīrumi).
- ▷ **Neievietojiet** karkasu fluorūdeņražskābē.

LV

Keramikas pārklājuma veidošana

- ▷ Ievērojiet keramikas ražotāja sniegtos norādījumus. Atkarībā no izmantotās keramikas piededzināšanas laiks un temperatūra var mainīties.

Finiša apstrāde

- ▷ Ar silikona pulēšanas līdzekli nopulējiet metāla malas līdz spodrpulējuma līmenim. Pulēšanas gaitā novērsiet siltuma izdalīšanos.

Vispārēji norādījumi**Metināšana ar lāzeru**

- ▷ Apstrādājiet sametināmās vietas ar alumīnija oksīda strūklu ar graudu izmēru 110 – 250 μm un tad tās notīriet.
- ▷ Sagatavojiet savienojamās vietas modificētas X tipa šuves veidā.
- ▷ Kā pildmateriālu izmantojiet CoCr lāzermetināšanas stiepli.

Pēc priekšmeta sametināšanas to var pārklāt ar keramisku materiālu.

Lodēšana

- ▷ Veiciet lodēšanu, izmantojot CoCrMo lodi un tai atbilstošus kušņus.
- ▷ Pēc sakausēšanas: veiciet lodēšanu krāsnī (pie 860 °C), izmantojot baltzelta (WGL) lodi un tai atbilstošus kušņus.



Stiprināšana

Pateicoties karkasu augstajai stiprībai un stabilitātei, vairumā gadījumu tos ir iespējams stiprināt parastā veidā, izmantojot tirdzniecībā pieejamās cementa šķirnes.

Piestrāde pie zobārsta

Ja, ievietojot gatavo objektu pacienta mutē, zobārstam to nākas pieslīpēt, noslīpētās vietas nepieciešams no jauna nopolēt līdz spīdumam. Pieslīpēšanai izmantojiet vienīgi dimanta slīpēšanas galviņas (ieteicamā graudainība ir aptuveni 40 μm). Pulēšanai ieteicams izmantot dimanta pulēšanas rīkus.



IEVĒRĪBAI:

Ja izstrādājums nav pietiekoši labi nopolēts, berzes dēļ var tikt bojāts antagonais zobs!

Kontrole pie zobārsta

Ir ieteicams reizi gadā noteikti pārbaudīt monolītās zobu protēzes, kas atrodas pacienta mutē. Kontroles laikā jāpārbauda atlikušo zobu stāvoklis, kā arī antagonie zobi un mutes mīkstie audi. Vajadzības gadījumā jāveic korigējoši pasākumi. Arī šajā gadījumā jāvelta uzmanība tam, lai objekti nobeigumā tiktu nopolēti līdz spīdumam.



Vides aizsardzība

Iesaiņojums

Ražotāja izstrādājumu iesaiņojuma materiāliem tiek nodrošināta optimāla pārstrāde, sadarbojoties ar nacionālajām izejvielu savākšanas un atkārtotas pārstrādes sistēmām.

Visi lietotie iesaiņojuma materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un atkārtoti izmantojami.

Utilizēšana

Veiciet konteinera un tā satura utilizēšanu atbilstoši vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem vai starptautiskajiem noteikumiem.



Piederumi



Sīkāku informāciju par šim izstrādājumam piemērotajiem piederumiem var atrast interneta vietnē www.amanngirrbach.com.

Informācija par lejupielādēm

Citas pamācības var lejupielādēt no interneta vietnes www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.









Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrba AG

Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrba.com
www.amanngirrba.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

978165-IN 2020-06-20



AMANNGIRRBACH