

## Gebruiksaanwijzing

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

**AMANNGIRRBACH**

32995FB 2016-08-30

## GEBRUIKSAANWIJZING CERAMILL D-WAX

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

### BESTEMMING

Freeswas voor basissen van volledige prothesen voor verwerking met CNC-freesapparaat Ceramill Motion 2 (5x).

### PRODUCTBESCHRIJVING

Ceramill D-WAX is een roze kleurige ruwe wasvorm van medische productklasse 1. Deze dient voor het vervaardigen en inpassen van basissen van volledige prothesen en wordt met CNC-freesapparaat Ceramill Motion 2 (5x) aan beide zijden onder waterkoeling bewerkt. De was is geschikt voor positiewijzigingen tijdens of na het inpassen bij de patiënt.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur:	roze	
Stollingspunt:	84 °C	ISO 2207
Viscositeit bij 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Oplosbaarheid in water:	niet oplosbaar	
Vlampunt:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Dichtheid bij 20 °C:	ca. 0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Geur:	zwak typisch	

### CHEMISCHE SAMENSTELLING

Koolwaterstofwas, natuurwas, kleurstoffen

### VERPAKKINGEN

760570	Ceramill D-WAX	H = 30 mm	Tandboogvorm
--------	----------------	-----------	--------------

### BEWAREN

Ruwe wasvormen tegen fel zonlicht beschermen. In originele verpakking en op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.

### WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

Bij thermische verwerking voor afzuiging van de dampen en voldoende ventilatie zorgen. Gevaar voor verbranding van de huid door heet smeltmateriaal. Bij de verwerking persoonlijke beschermende kleding (stofmasker, veiligheidsbril, werkhandschoenen en werkjasje) gebruiken.

### INDICATIE

- \_ Voor het frezen van een prothesebasis die bij de patiënt voor het inpassen in de mond kan worden geplaatst.
- \_ Te verwerken volgens de inbeddingsmethode voor koud of heet polymerisaat.

### HOUDBAARHEID

3 jaar vanaf productiedatum

### REINIGING NA HET FREZEN

Na het frezen moeten vlekken van de prothesebasis worden verwijderd met een doek die eerst met koud water is bevochtigd.

Voor nauwe plaatsen die met een doek niet kunnen worden bereikt, kan een zachte tandenborstel worden gebruikt.

### AFVALVERWIJDERING

Kan doorgaans met het huisvuil worden afgevoerd. Met inachtneming van de plaatselijke voorschriften kan het bijvoorbeeld naar een geschikte verbrandingsinstallatie worden gebracht.

### GARANTIE

Gebruikstechnische adviezen, of deze nu mondeling, schriftelijk of in het kader van een praktische instructie worden gegeven, berusten op onze eigen ervaringen en proeven en kunnen daarom slechts als richtlijn gelden. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld. Wijzigingen ten aanzien van constructie en samenstelling zijn daarom voorbehouden.

### VEILIGHEIDSGEGEVENSBLADEN / CONFORMITEITSVERKLARING

Veiligheidsinformatiebladen en conformiteitsverklaringen op aanvraag en op [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

<b>LOT</b>	Chargecode
<b>REF</b>	Artikelnummer
	Fabrikant
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
<b>Rx only</b>	Het product mag volgens de Amerikaanse wetgeving alleen door of in opdracht van een tandarts worden verkocht.
	Te gebruiken tot
<b>SN</b>	Serienummer