

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com

Achtung
Warning
Attenzione
Atención



Made in the European Union



AMANNGIRSBACH

33557-FB - 201612-05

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CERAMILL PONTIC

Tradução das instruções de operação originais

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os materiais de modelagem Ceramill são materiais sintéticos não endurecidos à luz, nas consistências fluidas e moldáveis.


Ceramill Pontic (760 522) tem uma consistência maleável e é usado para a modelação de pontes. Para o isolamento de gesso ou de verniz fosco contra resina de modelagem, serve o isolamento Ceramill Sep (760561) apropriado para o material sintético de modelagem.

MANIPULAÇÃO

Comprimento de onda de polimerização	400 - 500 nm
Tempo de polimerização	7 sec
Profundidade de polimerização	≤ 1mm

Dados válidos para Ceramill Pontic, com base num pedido à temperatura ambiente.

Resinas foto-polimerizáveis se encolhem durante a polimerização.

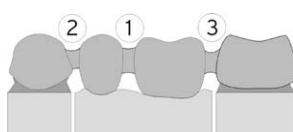

As partes intermediárias da ponte, feitas de Ceramill Pontic deve, primeiramente, ser unidas entre si ①. Após a completa polimerização, se deve então fixar, sucessivamente, com Ceramill Gel nas colunas terminais ② e ③.

Assim, evita-se potenciais distorções da estrutura.

A estrutura de material sintético pode, em caso de trabalhos complexos, ou quando o desenho da estrutura for ambíguo, ser colocado, temporariamente para o controle da adaptação, na cavidade bucal do paciente. Esta verificação, isto é, o tempo de permanência na cavidade bucal do paciente não é sempre realizada em cada trabalho e leva apenas alguns minutos.

ARMAZENAMENTO

Instruções de armazenamento: Não armazenar acima de 25 °C. Manter na embalagem bem original fechada. Proteger da luz.

Validade: 4 anos.

EFEITOS COLATERAIS

Paciente e utilizador: Materiais de modelagem Ceramill podem causar reações alérgicas. Utilizador: O contacto frequente e prolongado com material não polimerizado pode causar irritação na pele.

INTERAÇÕES

Não existem interações conhecidas.

CONTRA-INDICAÇÕES

Paciente e utilizador: Materiais de modelagem Ceramill não deveriam ser usados se houver uma alergia a qualquer um dos ingredientes.

NOTAS DE AVISO E DE SEGURANÇA

Observar a ficha de dados de segurança. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Evitar respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis. Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial. Evitar a libertação para o ambiente. Em caso de irritação cutânea: consulte um médico. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água. Eliminação do conteúdo do recipiente de acordo com as diretivas locais/regionais/nacionais/ internacionais.

CLÁUSULA DE GARANTIA / DE EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Recomendações técnicas para aplicação, se eles são dadas oralmente, por escrito ou no decurso de instruções práticas, são consideradas diretivas. Nossos produtos estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Portanto, reservamo-nos o direito a alterações no manuseio e na composição.

DADOS TÉCNICOS

	Pontic
Resistência à flexão	40 MPa
Módulo de elasticidade	1000 MPa
Alongamento de ruptura	12 %
Cor	azul

Composição química:

Ceramill Pontic: materiais sintéticos de modelagem dental, endurecidos à luz, à base de metacrilato.

EMBALAGENS / ACESSÓRIOS

760522	Ceramill Pontic – Embalagem à 2 unid.
760561	Ceramill Sep – Isolamento do gesso ou do verniz fosco contra o material sintético de modelagem

Fichas de dados de segurança e declarações de conformidade, podem ser obtidos a pedido, em www.amanngirschbach.com.

LOT Código de lote

REF N° de artigo

Fabricante

Observar as instruções de uso

Utilizável até

Limitação de temperatura

Atenção

Perigo para o meio ambiente