



32956FB 2016-08-30

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girschbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirschbach.com  
www.amanngirschbach.com

**AMANNGIRSBACH**

## INSTRUÇÕES DE USO Ceramill TEMP Multilayer CORES DE DENTES COM GRADIENTE DE COR

Tradução das instruções de operação originais Por favor, leia com atenção!

### FINALIDADE

Ceramill TEMP Multilayer são peças em bruto de PMMA para a fresagem de coroas e pontes (individuais e de vários componentes), construídas e produzidas com um sistema CAD/CAM.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Peças em bruto Ceramill TEMP Multilayer são peças em bruto de fresagem da cor do dente com gradiente de PMMA para o processamento em uma máquina de fresagem, a partir das quais são produzidas coroas de material sintético, assim como pontes e suportes de material sintético para as próteses dentárias no contexto de tratamentos pré-protéticos provisórios na região facial e labial.

### DADOS TÉCNICOS

VALORES FÍSICOS PARA CERAMILL TEMP MULTILAYER



Teste de	
Solubilidade	< 0,8 / mm <sup>3</sup>
Resistência à flexão	> 100 MPa
Absorção de água	< 20 µg / mm <sup>3</sup>
Módulo flexível	2200 MPa
Resistência à tracção	> 75 MPa
Teor de monómetro residual	< 0,7 %

### COMPOSIÇÃO

- \_ Polimetilmetacrilato (PMMA)
- \_ Pigmentos biocompatíveis
- \_ EDMA e fluorescente

### CORES

Estão disponíveis 4 diferentes cores de dentina: A1/A2, A3, B1/B2 e C2/C3. Três ou quatro peças em bruto podem ser adquiridas em cores duplas. Na nidificação na parte superior da peça em bruto se obtém a cor mais clara e na parte inferior a cor mais escura.

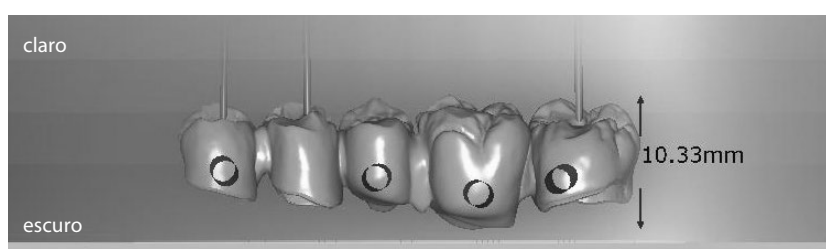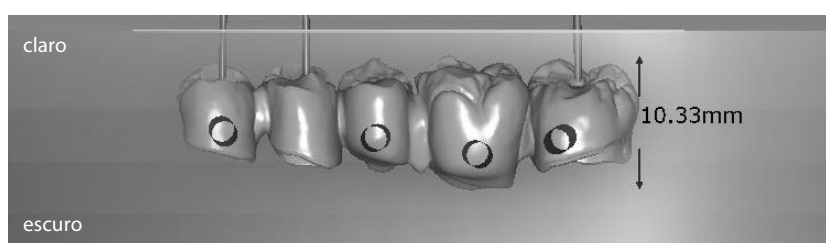

Nota: Para uma melhor apresentação, o software apresenta 3 camadas de cores, mas o material só possui 3 camadas de cores.

### ARMAZENAMENTO

Proteger da luz solar directa e armazenar em temperatura ambiente.

### NOTAS DE PERIGOS

Durante o processamento de peças em bruto Ceramill TEMP é produzido poeira, que pode causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias. Observe, portanto, sempre um bom funcionamento do dispositivo de aspiração na sua máquina de fresagem. Outras informações relacionadas à segurança, se encontram na Ficha de Segurança.

### PERÍODO DE USO

Até 12 meses.

### NOTAS PARA O UTILIZADOR

#### Construção:

- \_ A espessura mínima da parede de coroas, não deve ser inferior a 1 mm na oclusal e de 0,6 mm na cervical.
- \_ Na construção de pontes só devem ser colocados, no máximo, 2 elementos intermediários.
- \_ Na construção de pontes, as secções transversais de conexão entre as coroas e os elementos das pontes não devem ultrapassar 3,6 mm anterior e 4,4 mm posterior.

### ELABORAÇÃO

- \_ Para o reprocessamento e a separação de suportes da peça em bruto, deveriam ser usados fresas de carboneto de tungsténio de dentes cruzados, apropriadas ou discos de corte apropriados.
- \_ Para evitar ajustes imprecisos após a fabricação de suportes, deve ser evitado um forte desenvolvimento de calor durante a elaboração e o polimento.

#### Nota importantes:

Durante o processamento e polimento deve ser evitado sobreaquecimento!  
Produto medicinal para uma única utilização!

### RESTAURAÇÃO

Suportes, completas coroas e pontes, feitos de peças em bruto Ceramill TEMP, podem ser produzidos novamente e complementados, a qualquer momento, com todos os polímeros frios comercialmente disponíveis, à base de MMA.

### OPÇÕES PARA A FIXAÇÃO NA BOCA

- \_ para o provisório: cimentos temporários sem eugenol

### NOTAS ESPECIAIS

Indicar o n° LOT em cada procedimento que exige uma identificação do material.  
CUIDADO: Desinfecção deve ser realizada por radiação ultravioleta e não numa autoclave.

### DURABILIDADE

10 anos a partir da data de fabricação.

### DESCARTE

Ceramill TEMP é insolúvel em água, inactivo, não representa uma ameaça para as águas subterrâneas e pode, portanto, ser descartado no lixo doméstico normal.

### FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fichas de dados de segurança e declarações de conformidade, podem ser obtidas a pedido, em [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com).

**As propriedades do produto são baseadas no cumprimento e na observância destas instruções de uso.**

<b>LOT</b>	Código de lote
<b>REF</b>	N° de artigo
	Fabricante
	Observar as instruções de uso
	Utilizável até
<b>SN</b>	Número de série