

## Instrucțiunilor de utilizare

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girschbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirschbach.com  
www.amanngirschbach.com

Achtung  
Warning  
Attenzione  
Atención

Made in the European Union



AMANNGIRSBACH

33557-FB 201612-05

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CERAMILL PONTIC

Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

## DESCRIEREA PRODUSULUI

În cazul materialelor de modelare Ceramill este vorba despre materiale de modelare sintetice cu întărire la lumină, de consistență fluidă și maleabile.


Ceramill Pontic (760522) are o consistență maleabilă și se utilizează pentru modelarea elementelor intermediare ale punților. La izolarea gipsului respectiv a lacului opac special de materialul sintetic de modelare, servește izolanul Ceramill Sep (760561). Ceramill Sep (760561), adaptat la materialul sintetic de modelare respectiv.

## MANEVRARE

Lungime undă polimerizare	400 - 500 nm
Timp de polimerizare	7 sec
Adâncime de polimerizare	≤ 1mm

Specificațiile sunt valabile pentru Ceramill Pontic, prelucrate la temperatura camerei.

În principiu, materialele sintetice cu întărire la lumină se contractă în timpul polimerizării.

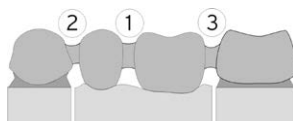

Conectați mai întâi între ele elementele intermediare de punte din Ceramill Pontic ①. După finalizarea polimerizării fixați-le succesiv cu Ceramill Gel de dinții stâlpi ② și ③.

Astfel veți evita eventuala deformare a scheletului.

În cazul lucrărilor laborioase sau dacă designul scheletului nu este clar, pentru controlul potrivirii, scheletul din material sintetic poate fi introdus provizoriu în cavitatea bucală a pacientului.

În principiu, această probă, adică menținerea timp de câteva minute în cavitatea bucală a pacientului, nu se efectuează pentru toate restaurările dentare.

## DEPOZITARE

Instrucțiuni de depozitare: A nu se depozita la temperaturi de peste 25 °C. A se păstra în ambalaj original închis ermetic. A se proteja împotriva luminii. **Stabilitate la depozitare: 4 ani.**

## EFECTE SECUNDARE

Pacient și utilizator: Materialele de modelare Ceramill pot provoca reacții alergice. Utilizator: Un contact cutanat frecvent și îndelungat cu material nepolimerizat poate duce la iritații ale pielii.

## INTERACȚIUNI

Nu există interacțiuni cunoscute.

## CONTRAINDICAȚII

Pacient și utilizator: Materialele de modelare Ceramill nu ar trebui utilizate în cazul existenței unei alergii cunoscute la substanțele conținute de acesta.

## AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Respectați fișa tehnică de securitate. Poate provoca o reacție alergică a pielii. Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței. Evitați dispersarea în mediu. În caz de iritare a pielii: consultați medicul. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. Eliminarea conținutului/recipientului conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.

## CLAUZĂ DE GARANȚIE / EXCLUDERE A RĂSPUNDERII MATERIALE

Recomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecționare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește manipularea și compoziția acestora.

## DATE TEHNICE

	<b>Pontic</b>
Rezistență la îndoire	40 MPa
Modul de elasticitate	1000 MPa
Alungire la rupere	12 %
Culoare	albastru

## Compoziție chimică:

Ceramill Pontic: materiale sintetice de modelaredentară, cu întărire la lumină, pe bază de metacrilat.

## AMBALAJE / ACCESORII

760522	Ceramill Pontic – Amb. de 2 buc.
760561	Ceramill Sep – Izolant între gips resp. lac opac special și materialul sintetic de modelare

**Fișele tehnice de securitate sunt disponibile la cerere cât și la [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com)**

**LOT** Cod șarjă

**REF** Număr articol

Producător

Respectați instrucțiunile de folosire

Utilizabil până la

Limitarea temperaturii

Atenție

Pericol ecologic