

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girschbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirschbach.com  
www.amanngirschbach.com



CE 0123



**AMANNGIRSBACH**

32957-FB 2016-08-30

RO

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Ceramill Splintec Standard

Traducerea manualului de operare original Vă rugăm să citiți cu atenție!

### SCOPUL UTILIZĂRII

Ceramill Splintec Standard sunt blanchuri din PMMA pentru frezarea de atele ocluzale mobile construite și produse cu un sistem CAD/CAM.

### DATE TEHNICE

VALORI FIZICE PENTRU CERAMILL SPLINTEC STANDARD

#### Test efectuat pentru

Solubilitate	< 0,8 μg/mm <sup>3</sup>
Absorbție apă	< 20 μg/mm <sup>3</sup>
Modul de elasticitate	2200 MPa
Rezistență la îndoire	> 100 MPa
Conținut monomer rezidual	< 0,7%

### COMPOZIȚIE

\_ polimetilmetacrilat (PMMA)  
\_ EDMA și fluorescent

### CULOARE

transparent

### DEPOZITARE

A se proteja împotriva radiației solare directe și a se depozita la temperatura camerei.

### AVERTIZĂRI DE PERICOL

La prelucrarea blanchurilor Ceramill Splintec Standard se produc pulberi care pot provoca iritații ale ochilor, pielii și căilor respiratorii. De aceea, aveți întotdeauna grijă ca extractorul de praf al mașinii dumneavoastră de frezat să funcționeze perfect.  
Alte informații privind siguranța găsiți în fișa tehnică de securitate.

### DURATĂ DE PURTARE

Până la 6 luni.

### REALIZARE

\_ Pentru finisarea și desprinderea atelelor ocluzale din piesa brută ar trebui să se folosească freze din carburi metalice cu dinți în cruce sau discuri de tăiere adecvate pentru rășini acrilice.  
\_ Pentru evitarea inexactităților de potrivire după realizarea scheletelor, în timpul finisării și lustruirii ar trebui evitată degajarea puternică de căldură.

**Indicații importante:** În timpul prelucrării și lustruirii evitați încălzirea excesivă  
Produs medical de unică utilizare!

### RECONDIȚIONARE

Atele ocluzale, fabricate din blanchuri Ceramill Splintec Standard, pot fi recondiționate și completate oricând cu toate rășinile acrilice pe bază de MMA cu polimerizare la rece uzuale din comerț.

### INDICAȚII SPECIALE

Indicați nr. de LOT la fiecare procedură care necesită identificarea materialului.  
ATENȚIE: Dezinfecția trebuie să se efectueze cu raze ultraviolete, nu în autoclave.

### TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației

### ELIMINARE

Ceramill Splintec Standard este insolubil în apă, inactiv, nu este periculos pentru apele freactice și de aceea poate fi eliminat în gunoiul menajer.

### FIȘE TEHNICE DE SECURITATE / DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Fișele tehnice de securitate și declarațiile de conformitate sunt disponibile la cerere cât și la [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com)

**Proprietățile produsului se bazează pe respectarea și conformarea la această informație de utilizare.**

**LOT** Număr șarjă

**REF** Număr articol

**Manufacturer** Producător

**Information** Respectați instrucțiunile de folosire

**Warning** Utilizabil până labis

**SN** Număr de serie