

ceramill[®] a-splint

SV Bruksanvisning



AMANNGIRRBACH

- Översättning av originalmanual -

Innehållsförteckning

Symbolförklaring	4
Allmänna säkerhetsanvisningar	6
Lämplig personal	6
Egenskaper	7
Garantiåtagande/Befrielse från ansvar	9
Kontroll av råmaterialblocken	9
Montering på arbetsbordet	9
Användning	10
Miljöskydd	11
Tillbehör	12
Nerladdningsinfo	12

SV



Symbolförklaring

Varningsanvisningar



Varningsanvisningarna i texten är märkta med en varningstriangel och inramade.



Vid risk för elström ersätts utropstecknet i varningstriangeln med en blixtsymbol.

Signalorden framför varningsanvisningarna beskriver av vilket slag och hur allvarliga följderna är om åtgärderna för avvärjande av riskerna inte följs.

- _ **ANMÄRKNING** betyder att materiella skador kan uppstå.
- _ **FÖRSIKTIGHET** betyder att lindriga till måttliga personskador kan uppstå.
- _ **VARNING** betyder att allvarliga personskador kan uppstå.
- _ **FARA** betyder att livsfarliga personskador kan uppstå.

Viktig information









Symbolen intill står för viktig information utan risker för människor eller sakskada. Informationen omges av linjer.



Ytterligare symboler i anvisningen

Symbol	Betydelse
▷	Moment i åtgärdsbeskrivning
–	Moment i lista
•	Undermoment för beskrivning av åtgärd eller i lista
[3]	Siffror inom hakparenteser hänför sig till bilderna

Ytterligare symboler på produkten

Symbol	Betydelse
	Artikelnummer
	Charge-kod
	Tillverkare
	Följ bruksanvisningen
	Användbar fram till
Rx only	Produkten får enligt amerikansk federal lag bara säljas av, eller på uppdrag av, en tandläkare.
	Serienummer

Allmänna säkerhetsanvisningar

SV



FÖRSIKTIGHET:

PMMA-damm kan orsaka hälsorisker!

Vid bearbetning av konstruktioner med Ceramill A-Splint kan det uppkomma damm, som kan leda till retning av ögon och andningsvägar.

- ▷ Se till att fräsmaskinen och arbetsplatserna för efterbearbetning har fungerande utsug.
- ▷ Använd personlig skyddsutrustning (till exempel dammskyddsmask och skyddsglasögon) under arbetet.
- ▷ Ytterligare säkerhetsrelevanta anvisningar framgår ur säkerhetsdatabladet.



ANMÄRKNING:

Alla allvarliga händelser i samband med produkten ska anmälas till tillverkaren och ansvariga myndigheter i den medlemsstat, där användaren och/eller patienten finns.

Lämplig personal



ANMÄRKNING:

Produkten får endast bearbetas av utbildade tandtekniker/tandläkare.



Egenskaper

Användningsändamål

Ceramill A-Splint är färdiga, polymetylmetakrylatbaserade CAD/CAM-råmaterialblock för fräsning av skenor och för att kontrollera passformen på gipsmodellen/munnen innan den slutgiltiga restaureringen görs.

Produktbeskrivning

Ceramill A-Splint är råmaterialblock för tillverkning av skenor (okklusionsskenor). Dessa skenor förhindrar över- och/eller felbelastning av tandsubstansen, tandhållarapparaten och käklederna. Användningsperioden är maximalt tre år.

Säkerhetsdatablad/försäkran om överensstämmelse

Säkerhetsdatabladet kan laddas ner från Amann Girrbachs webbplats från *Services > Downloads > Additional documents (Tjänster > Nedladdningar > Kompletterande underlag)*. Försäkran om överensstämmelse för produkten kan vid behov fås från tillverkaren.



Tekniska data

	Enhet	Ceramill A-Splint (DIN EN ISO 20795-2)
3-punktböjhallfasthet	MPa	> 100
Densitet	g/cm ³	1,19
Vickers-hårdhet	HV0,2	24
Vattenabsorbtion	µg/mm ³	< 25
Löslighet	µg/mm ³	< 0,7
Restmonomerhalt	%	< 1
Brottseghet	MPa√m	> 3,5

Kemisk sammansättning

_ Polymetylmetakrylat (PMMA)

Råmaterialblockens livslängd

Råmaterialblocken kan användas 4 år efter tillverkningsdatum om de lagras på lämpligt sätt.

Lagring

- _ Förvaras alltid i originalförpackningen.
- _ Förvaras åtskilt från livsmedel.
- _ Behållaren ska alltid vara sluten.



Garantiåtagande/Befrielse från ansvar

Användningstekniska rekommendationer gäller som direktiv oberoende av om de ges muntligt, skriftligt eller som praktisk anvisning. Våra produkter vidareutvecklas kontinuerligt. Vi reserverar oss för ändringar i hantering och sammansättning.

Kontroll av råmaterialblocken

Se efter att råmaterialblocken är felfria. Om ett (transport-)skadat materialblock används kan ersättningsanspråk inte ställas.

Montering på arbetsbordet



Monteringen av råmaterialblocken beskrivs i bruksanvisningen för respektive fräsmaskin.

Användning

Indikationer

- _ Skenor för terapeutisk restaurering vid korrigerande av käkledsproblem och tuggplan med en maximal användningstid på tre år.
- _ Kontroll av passningen vid gipsmodellen/munnen innan den slutgiltiga restaureringen.

Kontraindikationer

- _ användning för definitiva restaureringar
- _ känd inkompatibilitet mot beståndsdelar
- _ alla indikationer som inte anges under "Indikationer"

Utbytning och efterputsning

- ▷ För utbytning och efterputsning av konstruktioner ur råmaterialblock ska för plast lämpliga krysskäriga hårdmetallfräsar eller lämpliga kapskivor användas.
- ▷ Polera ytorna noggrant till högglass.
- ▷ För att undvika passningsojämheter efter tillverkningen av konstruktionen måste kraftig värmeutveckling under utarbetning och polering undvikas.



Kompletteringar

Konstruktioner som tillverkats av Ceramill A-Splint kan restaureras och kompletteras med vanliga kallpolymerer baserade på MMA.

- ▷ Behandla först ytan, helst med ett passande vidhäftningsmedel baserat på MMA.
- ▷ Beakta uppgifterna från tillverkaren av påbyggnadsmaterialet.

Miljöskydd

Förpackning

Förpackningsmaterialet ska lämnas till närmaste kommunala återbruk.

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas.

Råmaterialblockens avfallshantering

Innehållet/behållaren ska hanteras enligt lokala, nationella och internationella regler.

Avfallet ska hanteras enligt myndigheternas föreskrifter.

Tillbehör



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
Mera information om produktspecifika tillbehör finns på www.amangirrbach.com.

Nerladdningsinfo

Mer anvisningar kan laddas ner från

www.amangirrbach.com/instruction-manuals.









Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

Rx only



AMANNGIRRBACH