

## SV Bruksanvisning

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com  
www.amanngirrbach.com

Achtung  
Warning  
Attenzione  
Atención

Made in the European Union



AMANNGIRRBACH

33557-FB - 201612-05

## BRUKSANVISNING

## CERAMILL PONTIC

Översättning av originalbruksanvisning

## PRODUKTBESKRIVNING

Ceramill modelleringsmaterial är ljushärdande modelleringsplaster, konsistensen är tunnflytande och knådbar.

Ceramill Pontic (760 522) har en knådbar konsistens och används för modellering av bromellanleder. För isolering av gips eller stumplack mot modelleringsplast används en särskild isolering Ceramill Sep (760561).

## HANTERING


Polymerisationsvåglängd 400-500 nm

Polymerisationstid 7 sec

Polymerisationsdjup ≤ 1mm

Uppgifterna gäller för Ceramill Pontic, när bearbetningen sker vid rumstemperatur.

Ljushärdande hartser krymper alltid under polymerisationen.

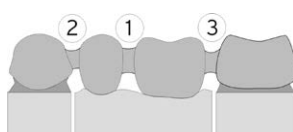

Förbind först bromellanleder av Ceramill Pontic med varandra ①. När polymerisationen är fullständig, fixera dem sedan en efter en med Ceramill Gel vid slutpelarna ② och ③.

På så sätt kan eventuella förskjutningar av skelettet undvikas. Plastskelettet kan tillfälligt läggas i patientens munhåla för kontroll av passningen vid omfattande arbeten eller när skelettets utformning inte är entydig. Denna inprovning, som innebär att skelettet under några minuter införs i patientens munhåla, behöver inte göras vid alla arbeten.

## LAGRING

Lagringsanvisning: Får inte lagras vid temperatur som överskrider 25 °C. Förvaras i sluten originalförpackning. Skyddas från ljus. **Lagringsstabilitet: 4 år.**

## BIVERKNINGAR

Patient och användare: Ceramill modelleringsmaterial kan orsaka allergiska reaktioner. Användare:

Ofta förekommande eller långvarig hudkontakt med opolymeriserat material kan orsaka hudirritation.

## VÄXELVERKAN

Det finns ingen känd växelverkan.

## KONTRAINDIKATIONER

Patient och användare: Ceramill modelleringsmaterial ska inte användas om patienten eller användaren är allergisk mot någon ingrediens.

## VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs noga igenom säkerhetsdatabladet. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik utsläpp till miljön. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. Hantering av innehållet/behållaren ska ske enligt lokala/regionala/nationella/internationella regler.

## GARANTIÅTAGANDE /

## BEFRIELSE FRÅN ANSVAR

De användningstekniska rekommendationerna gäller som riktlinjer, oberoende av om de ges muntligt, skriftligt eller som praktisk anvisning. Våra produkter vidareutvecklas kontinuerligt. Vi reserverar oss för rätten till ändringar av handhavande och sammansättning.

## TEKNISKA DATA

	Pontic
Böjhållfasthet	40 MPa
Elasticitetsmodul	1000 MPa
Brottöjning	12 %
Färg	blå

## Kemisk sammansättning:

Ceramill Pontic: ljushärdande dentala modelleringsplaster baserade på metakrylat.

## FÖRPACKNINGAR / TILLBEHÖR

760522	Ceramill Pontic - Förpackning med t st.
760561	Ceramill Sep - Isolering av gips och stumplack mot modelleringsplast

Säkerhetsdatablad fås på begäran eller från

[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com).

Charge-kod

Artikelnummer

Tillverkare

Följ bruksanvisningen

Användbar fram till

Temperaturbegränsning

Observera

Miljörisker