



Bohrschablone zur Wandmontage Ihres Smartmix boring template for wall mounting your Smartmix

1. Schablone an gewünschter Wandposition mittels Klebeband leicht befestigen.
Stick template onto required wall mounting position.
2. An den 4 Kreuzpunkten der strichlierten Linien mittels eines spitzen Gegenstands Markierungen anbringen.
Mark the center of the 4 crossed lines using a tip end instrument.
3. Schablone entfernen. Bohrungen vornehmen. Anschliessend die beigelegten Dübel in die Bohrlöcher einpressen und die dazugehörigen Schrauben bis ca. 4 mm vor Anschlag eindrehen.
Remove template and drill the holes. Now you can press the enclosed dowels into the holes. Screw the enclosed bolts into the dowels and leave a 0.15 inch space before they align with the dowels.
4. Jetzt können Sie Ihren Smartmix einfach über die gross dargestellten Einführlöcher aufhängen. Gerät nicht loslassen bevor vollständig eingerastet.
The bigger holes on the back (marked black on this template) will help you finding the screw-positions when hanging Smartmix onto the wall. Check carefully if the device has engaged correctly on your wall before removing the weight from your arms when holding the device.

Wandschablone Smartmix Artikel-Nr. 115666
boring template Smartmix Order no. 115666

Amann Girrbach GmbH

Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-0
Fax +43 5523 55990

Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159

austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com

